

AlphaSmart NEO

- det smarta skrivhjälpmedlet!



AlphaSmart NEO är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Enkel att använda!

AlphaSmart NEO är det smarta tangentbordet och skrivhjälpmedlet för PC och Mac.

Den sparar din tid! Tid för annat än att renskrivna texter.

Stor skärm, 2 - 6 textrader med valbara teckenstorlekar och lång batteridriftstid.

Svenskt tangentbord, svensk stavningskontroll, mm.


Dessutom: Mindre stölbegärlig än en portabel dator. Viktigt för alla - särskilt för skolorna!

Format: 195 x 134 x 26 mm. Vikt: 0,9 kg. Färg: Blågrön


- AlphaSmart NEO är enkel att använda som tangentbord/anteckningsbok/dator. Anslut, tryck på "Sänd" och det som skrivits i NEO överförs till PC eller Mac.
- AlphaSmart NEO fungerar oavsett program. Överföring till datorn görs via USB-kabel. Det går även att skicka från datorn till NEO. AlphaSmart NEO har en inbyggd IR-sändare -trådlös överföring kan göras om datorn har IrDA-port.
- AlphaSmart NEO har svenskt tangentbord med tangenter i normalstorlek.
- AlphaSmart NEO har låg strömförsörjningskostnad. Driftstiden är c:a 700 tim. med tre 1,5 V batterier, typ LR6. Kostnad 15:-/700 tim.!
- AlphaSmart NEO är robust och CE-certifierad enl 73/23/EEC & 89/336/EEC.
- LCD-skärmen har måtten 146 x 38 mm. Den kan ställas in för att visa 2, 3, 4, 5 eller 6 rader och därmed också olika teckenstorlekar - mellan 4 och 11 mm.
- AlphaSmart NEO säljs i två utföranden. Dels Artnr 6211 med NEO, batterier, USB-kabel, CD och Snabbguide. Vid köp av PAKET, artnr 6212 ingår även väska.

Texten kan visas på 2 till 6 rader, genom att ändra teckenstorleken.

2 rader - teckenstorlek c:a 11 mm

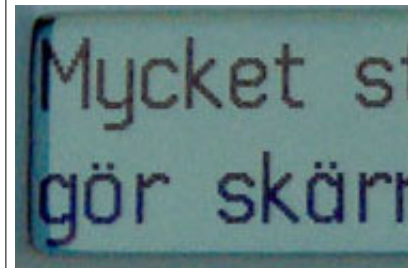


3 rader - teckenstorlek c:a 8 mm

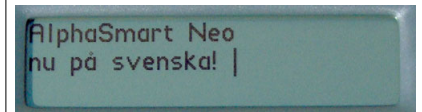

4 rader - teckenstorlek c:a 6 mm

5 rader - teckenstorlek c:a 5 mm

6 rader - teckenstorlek c:a 4 mm

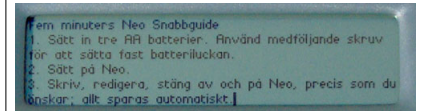

Vid köp av AlphaSmart NEO medföljer CD'n "AlphaSmart Manager 2".

- Skapa innehållet i AlphaWord filer och skicka dessa till en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Hämta in AlphaWord filer från en eller flera anslutna AlphaSmart NEO och spara dem i datorn.
- Installera och ta bort SmartApplets (små program) i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Kontrollera status och göra grundinställningar i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Behörighet att skydda innehållet i AlphaSmart NEO/AlphaSmart Manager med lösenord.

Svensk Handledare -AlphaSmart Manager 2. Vi har översatt den till svenska. Den medföljer bara när du köper AlphaSmart NEO från Rehabmodul AB.

PRODUKTER

Artikelnummer

AlphaSmart NEO, USB, brux, batterier	6211
AlphaSmart NEO, PAKET, som 6211 inkl väska	6212
10 st AlphaSmart NEO, som 6211	6251
10 st AlphaSmart NEO, som 6212	6252

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

AlphaSmart NEO kan användas som externt tangentbord vid USB anslutning. Texten är då synlig endast på datorskärmen och i dokumentet - inte i NEO.

ISO 22 33 06

Rehabmodul AB är ansluten till



Rehabmodul AB



För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butikan](http://www.rehabmodul.se) på www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm