

# Rehabmodul AB Snabbguide




# AT 24

©: Rehabmodul AB, 10/2009

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

Brukarstöd: [support@rehabmodul.se](mailto:support@rehabmodul.se)

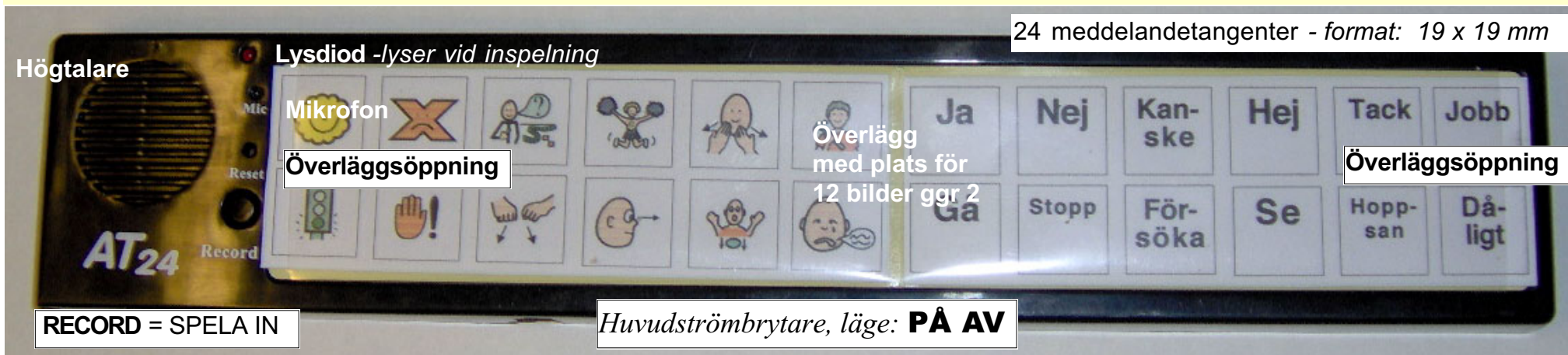

## Användningsområden

- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmiddel.
- Träning av bild- och språkförståelse.

**Total inspelningstid är c:a 4 minuter**

## Strömförsörjning

- I läge AV drar AT 24 ingen ström. Vid PÅ - mycket låg ström när den inte pratar (viloläge).
- 2 stycken 1,5 volt alkaline-batterier, typ LR03 (AAA). Enligt tillverkaren en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid "normal användning".
- Batterierna finns i batterifacket på vänster kortsida.

**+ polerna utåt!**



## Spela in meddelanden

- Sätt på AT 24 med huvudströmbrytaren på apparatens underkant. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på.
- Tryck på RECORD tangenten samtidigt som du trycker på en meddelandeknapp. Du håller knapparna intryckta under hela inspelningen. Den röda lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (Mic). Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (röda lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa båda tangenterna. Fortsätt att spela in varje meddelande.
- **Spela över ett meddelande:** Följ proceduren enligt ovan!
- **Radera ett enskilda meddelande:** Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

## Läsa ut meddelanden

Tryck på och släpp önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. Ett meddelande kan stoppas genom att trycka på en annan meddelanderuta.

## Volym

Volymkontroll saknas. Anpassa inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

## Överlägg

Ett antal tomma överläggsark medföljer, på vilka du kan sätta på bilder etc. På undersidan finns ett enkelt förvaringsfack.

## Reset

Om AT 24 inte fungerar som den ska, tryck på knappen i Reset-hålet för att återställa.

## Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.