

Rehabmodul AB Snabbguide



AT 6

©: Rehabmodul AB, 02/2010

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se



Användningsområden

- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läs upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmiddel.
- Träning av bild- och språkförståelse.

Total inspelningstid är c:a 1 minut

Strömförsörjning

- I läge AV drar AT 6 ingen ström. Vid PÅ - mycket låg ström när den inte pratar (viloläge).
- 2 stycken 1,5 volt alkaline-batterier, typ LR03 (AAA). Enligt tillverkaren en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid "normal användning".
- Batterierna finns i batterifacket på vänster kortsida.

+ polerna utåt!



Spela in meddelanden

- Sätt på AT 6 med huvudströmbrytaren på apparatens underkant. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på.
- Tryck på RECORD tangenten samtidigt som du trycker på en meddelandeknapp. Du håller knapparna intryckta under hela inspelningen. Den röda lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (Mic). Varje ruta kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (röda lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa båda tangenterna. Fortsätt att spela in varje meddelande.
- **Spela över ett meddelande:** Följ proceduren enligt ovan!
- **Radera ett enskilda meddelande:** Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

Läsa ut meddelanden

Tryck på och släpp önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. Ett meddelande kan stoppas genom att trycka på en annan meddelanderuta.

Volym

Volymkontroll saknas. Anpassa inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Överlägg

Ett antal tomma överläggsark medföljer, på vilka du kan sätta på bilder etc. På undersidan finns ett enkelt förvaringsfack.

Reset

Om AT 6 inte fungerar som den ska, tryck på knappen i Reset-hålet för att återställa.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.