

# Rehabmodul AB Snabbguide

©: Rehabmodul AB, 12/2015

Astrakängatan 151 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se



# Big Button

Med nivåer och stegning

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

## Big Button 5 med nivåer och stegning (BIG-05), Artnr: 3814

En talapparat som har inbyggd, lätttryckt Play-knapp (75 x 75 mm) med genomskinligt fack där en bild kan stoppas in.

- Format: Diam. 145 x 40 mm. Vikt: 220 g. 2xLR03 (AAA) alkaline batterier. En separat manöverkontakt kan också användas som Play-knapp. Uttaget är på höger-sidan, strax ovanför Volym upp-knappen. (Phono 3,5 mm, singel.)
- 10 nivåer - var och en med 8 sekunders inspelningstid.
- 3 aktiviteter - var och en med tio 8 sekunders steg.
- *Se även bifogade amerikanska User's Guide för fler bilder!*

En enklare variant, utan nivåer och stegning, finns även:

*Big Button* (BIG-01), som har 1 meddelande (Singel) på högst 30 sek. samt 3 meddelanden (Multi) på högst 30 sek, som kan läsas ut var gång Play-knappen trycks ned. Artnr: 3813

Tryck på ovansidan eller nedtill för att läsa ut meddelanden



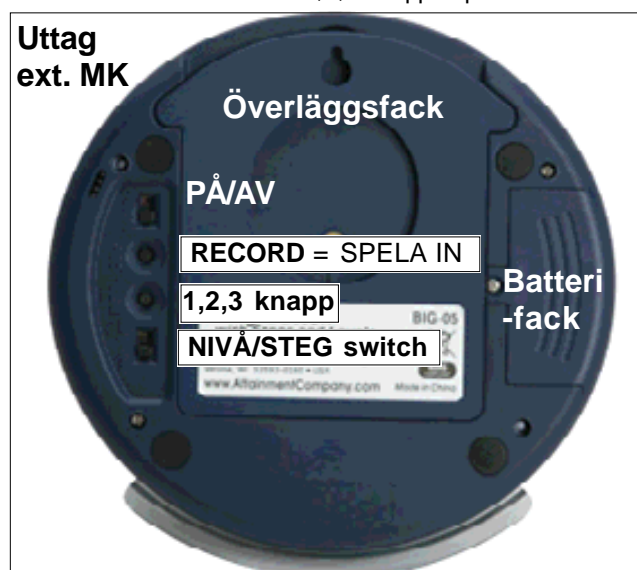
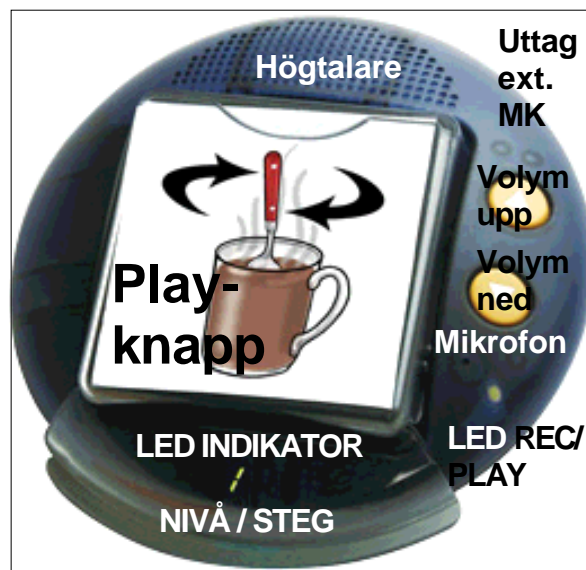
## Snabbt komma igång

### 1. Grundfakta



- PÅ/AV switch på undersidan
- Drivs med 2 st LR03 (AAA) batterier (ingår vid leverans)
- LED sifferindikator visar steg och nivåer genom det genomskinliga locket
- Inspelningsknapp (REC) på undersidan
- Volymkontroll med upp/nerknappar på ovansidan
- Ingjutet fästhål för monterings-tillbehör samt nyckelhålsfäste för väggmontering finns på undersidan
- Fack för förvaring av överlägg på undersidan

### 2. Funktioner

- Välj mellan stegning och nivåer med en switch på undersidan
- Välj från 10 nivåer med 1,2,3 knappen på undersidan
- Välj från 3 aktiviteter (A, B, C) också med samma 1,2,3 knapp på undersidan
- Spela in upp till 10 steg per aktivitet
- Tryck och håll nere PLAY - knappen under 5 sekunder för att nollställa stegfunktionen
- Ändra/redigera ett valfritt meddelande utan att det påverkar övriga meddelanden



## Volym

Volymen - högtalarljudet - styrs med  och  knapparna på apparatens ovansida, till höger om Play-knappen. Ett pip-ljud hörs var gång justering görs.

## Nivå- och stegningsfunktionerna

Välj mellan två funktionssätt med omkopplaren Step/Level på undersidan. Steg och nivå indikeras med LED-indikatorn under knapplocket.

- Vid Nivå (Level), kan ett meddelande läsas ut varje gång Play-knappen trycks ned. Välj en nivå med 1,2,3 knappen på baksidan.

- Vid Stegning (Step) kan olika steg i en aktivitetssekvens spelas upp var gång Play-knappen trycks ned. Apparaten har en kapacitet av 10 steg för var och en av de tre aktiviteterna. Tryck och håll nere Play-knappen under 5 sekunder, för att nollställa till steg 1.

## Nivå

### Inspelning vid nivåer

1. På undersidan, sätt Step/Level switchen i läge Level.
2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan - dvs apparaten är klar för inspelning.
3. Tryck på Volym-upp knappen för att lokalisera vilken nivå som ska ha inspelningen. Siffer-LED anger nivå med 1 - 9 samt sista med L (Last).
4. Tryck på och släpp Play-knappen och då ska den röda LED börja blinka. (Naturligtvis har du i förväg förberett vad du ska tala in!) Mikrofonen är strax under Volym-ned knappen - tala mot mikrofonen på ett avstånd av c:a 20 cm.

Fortsättning nästa sida!

*OBS: Klicket du hör när du trycker på Play-knappen kommer inte med på inspelningen.*

5. Tryck på och släpp Play-knappen igen, när du talat färdigt. Högsta inspelningstid är 8 sekunder och då avslutas inspelningen automatiskt. Röda LED lyser åter med fast sken.

6. Tryck på och släpp Volym ned-knappen för att lyssna på inspelningen. För att göra om - upprepa punkterna 3 - 5!

7. Avsluta inspelning med att trycka på och släppa REC-knappen. Röda LED slocknar.

*OBS: Du kan radera/redigera ett valfritt meddelande utan att det påverkar de andra meddelandena.*

## Läsa ut meddelanden vid nivåer

- Tryck på och släpp Play-knappen.
- Record/Play LED börjar blinka grönt under uppläsning.
- Om du vill avbryta, tryck kort på Play-knappen igen.
- Endast ett meddelande läses ut tills du ändrar nivå med 1,2,3 knappen på undersidan.

## Radera ett nivå-meddelande

1. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan.
2. Tryck på Volym-upp knappen för att lokalisera vilken nivå som ska raderas. Siffer-LED anger nivå

med 1 - 9 samt sista med L (Last).

3. Tryck kort 2 gånger (inom 1 sek) på Play-knappen för att radera.

4. Tryck på och släpp REC-knappen för att lämna inspelningsläget.

## Stegning

### Inspelning vid Stegning

*Tryck och håll nere Play-knappen under 5 sekunder, för att nollställa!*

1. På undersidan, sätt Step/Level switchen i läge **Step**.
2. Tryck på och släpp 1,2,3 knappen för att välja en av aktiviteterna (A,B,C). Du kan spela in upp till 10 steg för varje aktivitet.
3. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan och siffran "1" visas i LED-indikatorn. Apparaten är nu klar för inspelning av steg 1.
4. Tryck på och släpp Play-knappen och nu ska den röda LED börja blinka. (Naturligtvis har du i förväg förberett vad du ska tala in!) Mikrofonen sitter strax under Volym-ned knappen - tala mot mikrofonen på ett avstånd av c:a 20 cm.

*OBS: Klicket du hör när du trycker på Play-knappen kommer inte med på inspelningen.*

5. Tryck på och släpp Play-knappen igen, när du talat färdigt. Högsta inspelningstid är 8 sekunder och då avslutas inspelningen auto-

matiskt. Röda LED lyser åter med fast sken. Steg 2 visas nu i LED-indikatorn.

6. Tryck på och släpp Volym ned-knappen för att lyssna på inspelningen. För att göra om steg 1, stega fram med Volym upp-knappen tills du ser siffran "1" visas i LED-indikatorn - upprepa punkterna 4 - 5!

7. För att fortsätta inspelningarna (från t ex "2") - upprepa punkterna 4 - 5!

8. Avsluta inspelning med att trycka på och släppa REC-knappen. Röda LED slocknar.

*OBS: Du kan radera/redigera ett valfritt meddelande utan att det påverkar de andra meddelandena.*

## Läsa ut meddelanden vid stegning

- Lokalisera den önskade aktiviteten (A,B,C) med 1,2,3 knappen.
- För att läsa det första steget, tryck på och släpp Play-knappen. Record/Play LED börjar blinka gult under uppläsning. Om steget fullföljs, kommer nästa steg att automatiskt väljas.
- För att lyssna på föregående steg igen, tryck kort på Volym ned-knappen.
- Om du vill avbryta ett steg, tryck kort på Play-knappen igen. Nu kommer du inte automatiskt till nästa steg, utan LED-indikatorn visar ett L och ett pip hörs, som anger att du är i änden av

sekvensen.

*Tryck och håll nere Play-knappen under 5 sekunder, för att nollställa till steg 1.*

## Radera ett steg i en aktivitet

1. Lokalisera den önskade aktiviteten (A,B,C) med 1,2,3 knappen.
2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan.
3. Lokalisera steget du vill radera med Volym upp-knappen.
4. Tryck kort 2 gånger (inom 1 sek) på Play-knappen för att radera.
5. Tryck på och släpp REC-knappen för att lämna inspelningsläget.

## Radera alla steg i en aktivitet

*OBS: Omvänd ordning mellan pkt 1 och 2 jämfört med föregående.*

1. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan.
2. Lokalisera den önskade aktiviteten (A,B,C) med 1,2,3 knappen.
3. Tryck på och håll REC-knappen under 5 sekunder. Ett pip hörs och raderingen är nu gjord.
4. Tryck på och släpp REC-knappen för att lämna inspelningsläget.

## Nivå- och stegning

### Förhindra byte av nivå/aktivitet

- Lås apparaten till inställd nivå/aktivitet, med att inaktivera 1,2,3 knappen.
- För att göra det - stäng först av apparaten med PÅ/AV-knappen.
- Håll Volym ned-knappen intryckt och sätt på igen med PÅ/AV-knappen.
- När två stigande pip hörs, som indikerar att låset är aktivt, släpper du Volym ned-knappen.
- För att avaktivera låset, gör om ovanstående och när två fallande toner hörs är låset borttaget.

### Förhindra inspelningar

- Lås apparaten genom att först stänga av med PÅ/AV-knappen.
- Håll Volym upp-knappen intryckt och sätt på igen med PÅ/AV-knappen.
- När två stigande pip hörs, som indikerar att låset är aktivt, släpper du Volym upp-knappen.
- För att avaktivera låset, gör om ovanstående och när två fallande toner hörs är låset borttaget.

## Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.*