

Sweden

CARE

Trygghetstelefon

Bruksanvisning



DORO CARE

Bruksanvisning

Gratulerar till din nya telefon! DORO CARE är en ny trygghetstelefon där extra höga krav har ställts på kvalitet och användarvänlighet. DORO CARE levereras med trådlös larmknapp vilket gör användning och installation enkel. Telefonen har inbyggd hörselslinga, högtalarfunktion, återuppringning, justerbar lur- och högtalarvolym samt fyra snabbvalsminnen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inkoppling

Utseende	1
Uppackning	2
Inkoppling	2
Batterier	2
Hörselslinga	3
Viktig information	3
Placering av telefonen	3


Handhavande

Högtalarfunktion	4
Att ringa	4
Återuppringning	5
Volymkontroll	5
Reglerbar ringsignal	5
Trådlös larmknapp	6
Larmfunktion	6
Larmmeddelande	7
Nummerlista	7
Snabbval	8
Plus-tjänster	8
Avancerade larminställningar	9
Schematisk larmbeskrivning	10
Extern larmknapp	10

Övrigt

Om telefonen inte fungerar	11
Garanti	11
Declaration of conformity	12

UTSEENDE

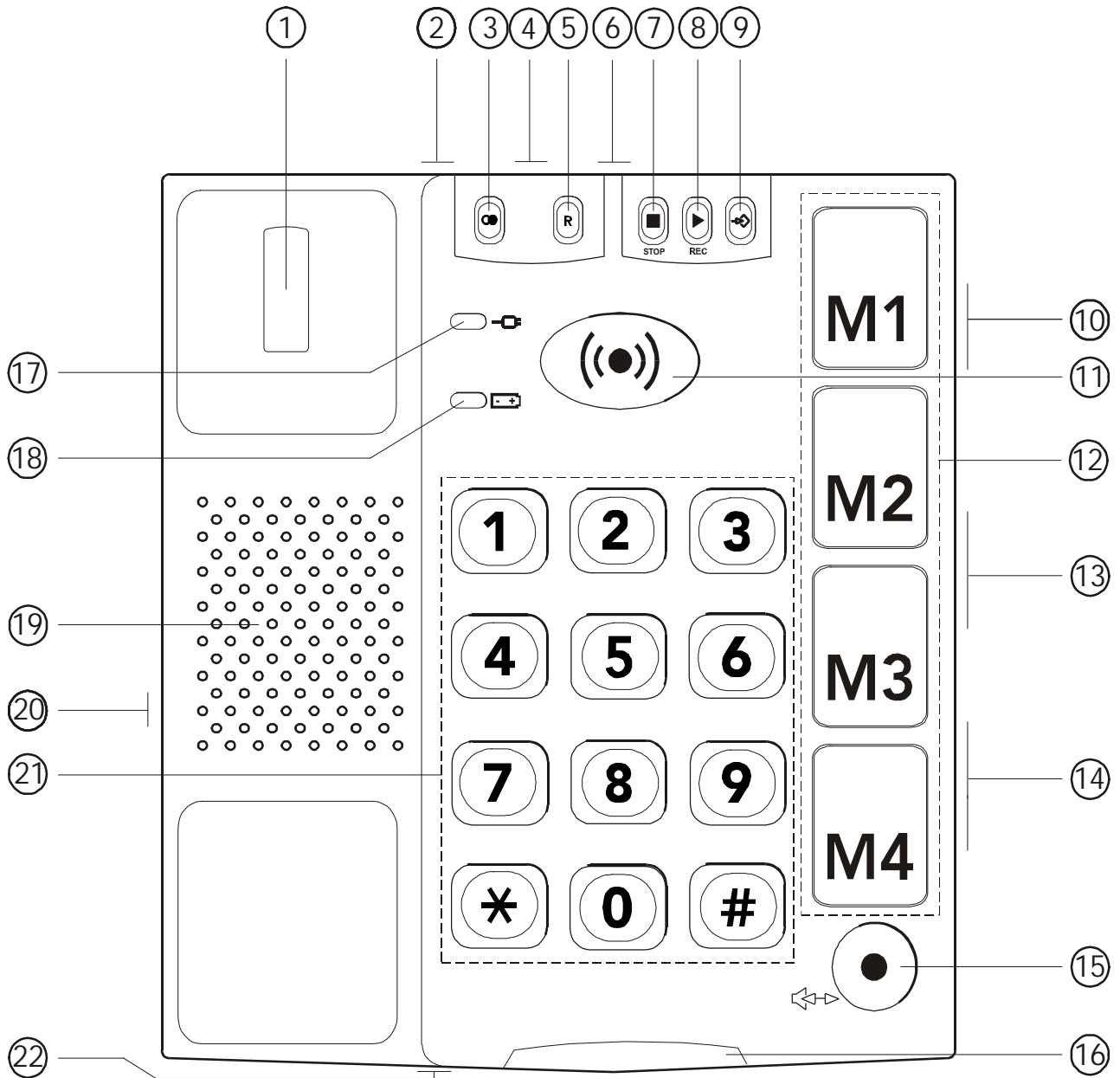

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Klyka | 12 | Snabbval/nummerlista |
| 2 | Uttag för extern larmknapp | 13 | Lurvolym (högersidan) |
| 3 | Återuppringning | 14 | Ringsignalomkopplare (högersidan) |
| 4 | Uttag för telesladden (baksidan) | 15 | Högtalarknapp |
| 5 | R-knapp | 16 | Ringsignalindikator |
| 6 | Uttag för adaptern (baksidan) | 17 | Nätindikator |
| 7 | Stoppknapp/larmavstängning | 18 | Batteriindikator |
| 8 | Inspelning av larmmeddelande | 19 | Högtalare |
| 9 | Lagring av snabbval/nummerlista | 20 | Uttag för lursladden (vänstra sidan) |
| 10 | Högtalarvolym (högersidan) | 21 | Sifvertangenter 0-9, *, # |
| 11 | Larmknapp | 22 | Mikrofon |

UPPACKNING

I leveransen ska följande delar medfölja:

- Telefon
- Trådlös larmknapp med tillbehör
- Telefonlur
- Batteri till den trådlösa larmknappen
- Adapter
- Bruksanvisning
- Telesladd
- Lursladd

Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad.

INKOPPLING


- Telesladden är försedd med en telepropp i ena änden och en modularkontakt i den andra. Teleproppen ansluts till ett telejack och modularkontakten ansluts till uttaget märkt LINE på telefonens baksida.
- Anslut den medföljande spiralsladden till uttaget på lurens undersida och till uttaget på telefonens vänstra sida. Ett klickljud hörs när modularkontaktarna kommit riktigt på plats.
- Anslut den medföljande nätadaptern till uttaget på telefonens baksida och till el-uttaget.
- Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

BATTERIER

För att larm, minne och högtalarfunktion skall fungera under eventuella strömavbrott behöver apparaten 6 st 1.5V batterier typ AAA (medföljer ej). Använd endast batterier av hög kvalitet.

- Drag ut telesladden innan du byter batteri.
- För att komma åt batterifacket, som sitter på undersidan, måste skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. Se till att batterierna vänds åt rätt håll!
- För att montera batteriet (medföljer) i larmknappen, tag bort batteriluckan på larmknappens undersida. Se till att batteriet vänds åt rätt håll!

OBSERVERA!

När batterierna är på väg att ta slut (eller ej är monterade) blinkar batteriindikatorn  i telefonens ovkant. Byt batterierna snarast!

HÖRSELSLINGA

Luren har en inbyggd hörselslinga för de som vill använda sin hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparatens telespole genom att ställa hörapparaten i T-läge.

VIKTIG INFORMATION

DORO CARE och den trådlösa larmknappen är designade och tillverkade för att ge en god säkerhet under lång tid. DORO CARE är speciellt utvecklad så att både installation och användande blir så enkelt som möjligt.

Automatisk uppringning till polis, brandkår o s v är normalt ej tillåtet. Programmera därför ej in dessa nummer i listan över vilka telefonnummer som ska ringas upp automatiskt vid larm (s k snabbval/nummerlista). Vissa privata säkerhetsföretag kan acceptera automatiska uppringningar från sina kunder med DORO CARE. Kontakta alltid säkerhetsföretaget innan programmering av deras telefonnummer sker.

Räckvidden på den trådlösa larmknappen varierar beroende på olika faktorer i den omgivande miljön. Radiovågorna som överför signalen stöter på många hinder på vägen mellan telefonen och larmknappen som dels reflekterar och dels absorberar radiovågorna med dämpningseffekter som följd. Räckvidden begränsas av väggar, golv, tak, metall- och betongkonstruktioner. Testa därför alltid att larmknappen verkligen har kontakt med telefonen genom att aktivera larmet på olika platser i bostaden/lokalen. Räckvidden varierar mellan 15-40 meter.

PLACERING AV TELEFONEN

När man väljer plats för huvudenheten bör man tänka på följande:

- DORO CARE skall alltid kopplas in på första telejacket.
- Placera inte telefonen nära annan utrustning, t ex TV-apparater, bildskärmar, element etc. Detta för att minska risken för eventuella störningar.
- Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller annan stark värme.
- I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på apparatens undersida färga av sig på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på underlag med känslig yta.

HÖGTALARFUNKTION

När du kopplar in telefonen för första gången, eller flyttar den till ett annat jack kan du behöva "ladda upp" telefonen för att högtalarfunktionen ska kunna aktiveras.


Detta görs enkelt genom att luren lyfts i cirka 2-3 sekunder. Hur du ringer med högtalarfunktionen beskrivs nedan. Högtalarfunktionen fungerar endast med adapter.

ATT RINGA



Uppringning kan ske på ett flertal olika sätt beroende på om man vill ringa med luren eller med högtalarfunktionen:

UPPRINGNING/SAMTAL MED LUREN

- Lyft luren och invänta kopplingston. Justera eventuellt ljudstyrkan med det mellersta reglaget på telefonens högra sida.
- Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.
- Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

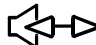Om så önskas kan du under samtalets gång skifta till högtalare genom att trycka på högtalarknappen  och lägga på luren. Samtalet kopplas upp i högtalaren. I högtalarläge talar du med den andra parten genom mikrofonen i telefonens framkant.


UPPRINGNING/SAMTAL I HÖGTALARLÄGE

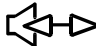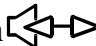- Tryck på högtalarknappen  . Högtalarfunktionen kopplas in och kopplingston hörs i högtalaren. Indikatorn i högtalarknappen tänds. Justera eventuellt ljudstyrkan med det övre reglaget på telefonens högra sida.
- Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.
- När mottagaren svarar kan du tala till denne genom mikrofonen i telefonens framkant.
- Tryck på högtalarknappen  igen för att avsluta samtalet och koppla ned linjen.

OBSERVERA!

Tänk på att det i högtalarläge inte går att "prata i mun" på varandra utan endast en åt gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt och styrs av ljudet (ditt tal) från rummet telefonen befinner sig, samt ljudet från telelinjen (din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens omgivning som stör högtalarfunktionen, t ex hög musik.



ÅTERUPPRINGNING

Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, kan detta ske med återuppringningsknappen  (sitter under vänstra luckan i telefonens överkant).

Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen ) och invänta kopplingston. Tryck därefter på återuppringningsknappen. Telefonen slår automatiskt det senast slagna numret.


VOLYMKONTROLL

Ljudstyrkan i telefonlur och högtalare kan justeras med reglagen på telefonens högra sida.

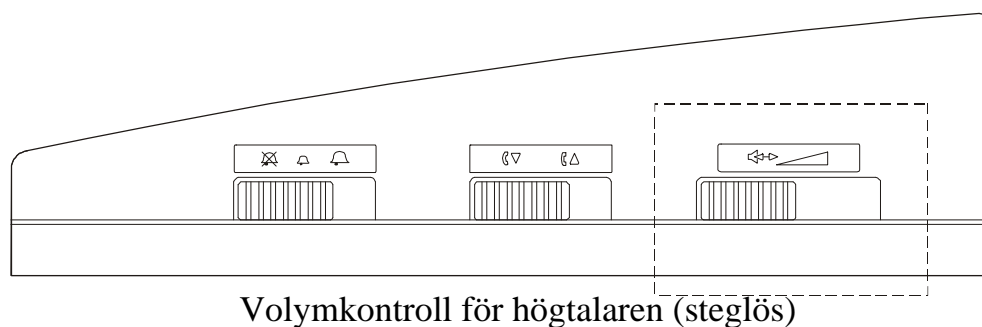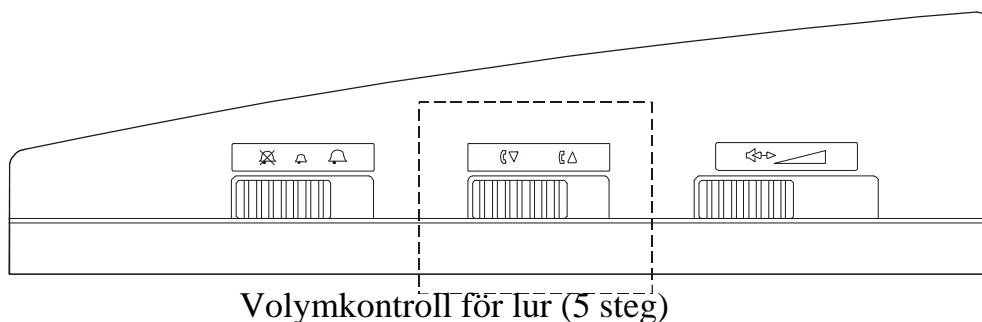

REGLERBAR RINGSIGNAL

Telefonens ringsignal kan ställas i ett tre olika lägen (Av, låg och hög).

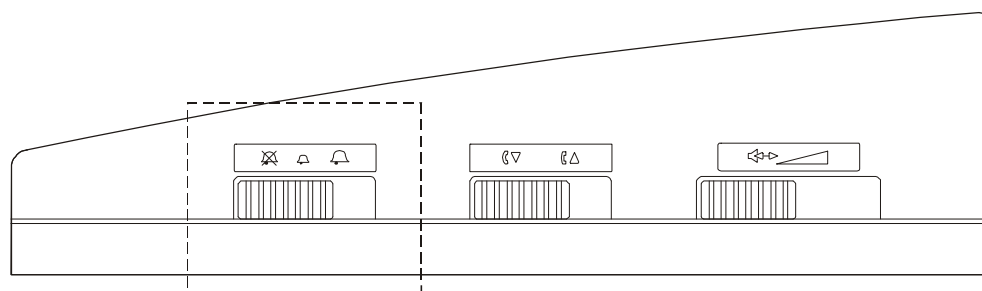

TRÅDLÖS LARMKNAPP

Till telefonen hör en trådlös larmknapp. För att knappen skall fungera måste ett batteri (medföljer) vara monterat, se sidan 2. Larmknappen kan bäras på tre sätt:

- Med bältesclips. Bältesclipset är monterat vid leverans.
- Med halsband. Montera halsbandet i en av de två öglorna på larmknappens baksida.
- Med armband. Tag av bältesclipset, och trä armbandet igenom de två öglorna på larmknappens baksida.

LARMFUNKTION

Larmet aktiveras manuellt genom att knappen **(●)** på telefonen eller knappen på den trådlösa larmknappen trycks. Knappen skall tryckas ned cirka 2 sekunder.

(Det går även att koppla till en kabelansluten larmknapp, se sidan 10)

Uppringningen startar direkt.

Varje telefonnummer (enligt nummerlistan) rings upp i turordning, och mottagaren hör ditt eget inspelade larmmeddelande. Om mottagaren trycker # kan samtal föras via högtalartelefonen.

Om mottagaren inte trycker någon av larminstruktionerna (* eller #) pågår upp-ringningen till varje nummer under 60 sekunder innan telefonen lägger på och nästa nummer i listan rings upp.

Nummerlistan repeteras sedan 14 gånger innan larmet stängs av.

Flera av dessa funktioner kan justeras, se *avancerade larminställningar* på sidan 9.

LARMINSTRUKTIONER

När mottagaren hör ditt larmmeddelande har vederbörande tre val:

Tryck # För att koppla upp högtalaren och avsluta larmmeddelandet. Samtal mellan dig och mottagaren kan nu föras via högtalartelefonen, såvida avståndet mellan dig och telefonen inte är alltför långt. Efter 3 minuter hörs en varningston, tryck # igen för att förlänga tiden med ytterligare 3 minuter. Tryck * eller vänta för att koppla ner linjen. Larmet är nu avaktiverat.

Tryck * För att stänga av larmet och avbryta uppringningen till övriga nummer. Praktiskt när ett tyst larm önskas.

Tryck ingenting Efter 60 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Praktiskt om t ex en telefonsvarare besvarar samtalet.

LARMMEDDELANDE

Larmmeddelandet är det röstbesked som automatiskt läses upp när larmet aktiverats. Upplys gärna i meddelandet ditt namn, adress och hur högtalarfunktionen aktiveras. Meddelandet kan vara upp till 30 sekunder långt. Knapparna för inspelning sitter under den högra luckan.

Exempel på meddelande:

-"Detta är ett larm från Sven Svensson på Storgatan 10 i Grönköping. Jag behöver er hjälp akut. Tryck fyrkant för att koppla upp högtalaren."

eller

-"Detta är ett larm från jourbutiken på Storgatan 30 i Grönköping. Vi har ett pågående rån eller inbrott, och behöver omedelbar hjälp. Tryck stjärna för att bekräfta uttryckningen och för att stoppa uppringning till fler personer."

INSPELNING AV MEDDELANDE

- Lyft luren.
- Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen [REC] (sitter under högra luckan i telefonens ovankant). Släpp knappen när ett kort pip hörs.
- Tala in larmmeddelandet i luren.
- Tryck på [STOP] knappen.
- Lägg på luren.

KONTROLLAVLYSSNING AV MEDDELANDE

Meddelandet kan kontrollavlyssnas när som helst. Se till att volymen är uppskruvad.

- Tryck en gång snabbt på inspelningsknappen [REC]. Svaret spelas upp i högtalaren.

NUMMERLISTA

I nummerlistan programmeras de telefonnummer som telefonen automatiskt skall ringa upp när larmet aktiverats.

Telefonen ringer numren i turordning (M1, M2, M3 och M4). Därför bör det viktigaste numret programmeras i position M1.



Glöm ej att informera de personer som finns programmerade i nummerlistan, så att de vet vilka åtgärder de skall utföra vid ett eventuellt larm. På DORO CARE representeras nummerlistan av de fyra snabbvalen M1-M4.

SNABBVAL

Telefonen har fyra snabbvalsminnen, i vilka telefonnummer kan lagras. När ett telefonnummer är lagrat i något av snabbvalen kan uppringning ske med endast en knapptryckning. Snabbvalen representeras av de fyra stora tangenterna på telefonens ovansida M1-M4. Telefonen kommer att ringa upp snabbvalen i turordning M1-M4, när alarmfunktionen aktiveras.

Under det genomskinliga locket på snabbvalsknapparna kan det läggas en bild eller symbol så att man snabbt och enkelt kan se vart snabbvalen går till.

LAGRA SNABBVAL:

- Tryck på lagringsknappen .
- Slå önskat telefonnummer med sifvertangenterna (max 16 siffror).
- Tryck på lagringsknappen  igen.
- Välj önskat snabbval M1-M4 genom att trycka på motsvarande knapp. Numret är lagrat.

Om ett snabbval behöver ändras eller bytas, lagra det nya ovanpå det gamla.

UPPRINGNING AV SNABBVAL MED LUREN:

- Lyft luren och invänta kopplingston.
- Välj önskat snabbval genom att trycka på motsvarande knapp. Telefonen slår automatiskt telefonnumret som finns lagrat i det valda snabbvalet.

UPPRINGNING AV SNABBVAL I HÖGTALARLÄGE:

- Välj önskat snabbval genom att trycka på motsvarande knapp. Telefonen kopplar automatiskt upp högtalarläget och slår telefonnumret som finns lagrat i det valda snabbvalet.

PLUS-TJÄNSTER

Denna telefon kan med knapparna R, # och * utnyttja alla PLUS-tjänster som AXE-växelstationerna erbjuder. Dock måste din telefon vara ansluten till en sådan för att du ska kunna utnyttja PLUS-tjänsterna. Lokala variationer kan förekomma rörande vilka av PLUS-tjänsterna som finns tillgängliga. Det är alltså inte säkert att alla PLUS-tjänster finns aktiverade i din AXE-växelstation. (R-knappen sitter under vänstra luckan i telefonens överkant).

För närmare information om vilka PLUS-tjänster du är ansluten till, ring Telias PLUS Guide på telefonnummer 020-442211.

AVANCERADE LARMINSTÄLLNINGAR

Vid leverans är telefonens larminställningar förberedda för de flesta användare. I undantagsfall kan det dock finnas behov av att ändra vissa av dessa. Detta görs med de små omkopplarna som sitter bakom den minsta luckan på telefonens undersida.

Följande inställningsmöjligheter finns:

Omkopplare	Nr	Läge	Leveransinställning
Antal uppringningar	4	OFF - 14 gånger ON - Obegränsat	14 gånger
10 sekunder	3	OFF - Av ON - På	Av
Längd på upp-ringning	2	OFF - 180 sekunder ON - 60 sekunder	60 sekunder
Tonsignalering	1	OFF - Tonsignalering ON - Röstmeddelande	Röstmeddelande

ANTAL UPPRINGNINGAR

Du kan ställa in hur många gånger ringlistan skall repeteras. Välj mellan 14 gånger eller obegränsat. Vid leverans är 14 gånger inställt.

10 SEKUNDER VARNING

Du kan aktivera en 10 sekunder lång varningssignal som hörs innan uppringningen startar. Praktiskt för att undvika falsklarm. Dock kan det i vissa situationer vara lämpligt att ha ett tyst larm för att inte avslöja aktiveringen. Vid leverans är varningen avstängd.



LÄNGD FÖR VARJE UPPRINGNING

Du kan ställa in om uppringningen till varje nummer skall vara i 60 eller 180 sekunder. Vid leverans är 60 sekunder inställt.

RÖSTMEDDELANDE ELLER TONSIGNALERING

Du kan välja om den uppringande skall höra ditt röstmeddelande eller en tonsignalering. Vissa tillämpningar kan kräva tonsignalering istället för röstmeddelande. Vid leverans är röstmeddelande inställt.

Programmering av tonsignalering:

- Tryck på lagringsknappen .
- Programmera önskad tonsignalering genom att trycka på motsvarande sifvertangent (max 16 siffror).
- Tryck på lagringsknappen  igen.
- Tryck * .
- Ställ omkopplaren 1 i läge OFF.

SCHEMATISK LARMBESKRIVNING

Nr	Läge	Beskrivning	Inställningsmöjligheter
1	VILA	Larmet ej aktiverat	
2	LARM	(●) trycks. Apparaten väntar sin givna tid innan larmet aktiveras. [STOP] kan stoppa larm. (STOP-knappen sitter under högra luckan i telefonens överkant).	0 eller 10 sekunders väntetid kan väljas.
3	LARM AKTIVERAT RINGER M1	Telefonen kopplar upp linjen och ringer upp det telefonnummer som finns lagrat i snabbval M1	- Numret rings under 60 eller 180 sekunder innan nästa nummer rings upp. - Antingen röstmeddelande eller tonsignalering kan väljas.
4	DEN UPPRINGDA PERSONEN SVARAR	Mottagaren hör det utgående svaret upprepade gånger. Vederbörande kan nu trycka: # för att koppla upp högtalarfunktionen och stänga av larmet. <i>och/eller</i> * för att stänga av larmet.	Vid tryck på # eller * stängs larmet av.
5	RINGER M2, M3,M4...	Telefonen ringer upp nästa nummer i nummerlistan (M2) och ringer sedan övriga i turordning (M3 och M4).	
6	REPETERAR LISTA	Telefonen ringer upp nummerlistan i turordning. (M1, M2, M3 och M4)	14 gånger eller obegränsat kan väljas.
7	VILA	Larmet ej aktiverat	

EXTERN LARMKNAPP

På baksidan av telefonen finns ett uttag (märkt EXT) för inkoppling av kabelansluten larmknapp. Inkoppling sker med 3,5mm monoprop och som larmknapp används en slutande strömbrytare t ex en tryckknapp till ringklocka. Den kabelanslutna larmknappen fungerar likadant som larmknappen på telefonen.

OM TELEFONEN INTE FUNGERAR

Om telefonen inte fungerar som den skall, läs först noga igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att telesladden är hel och att teleproppen och modularkontakten är ordentligt isatta. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om telefonen fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.

Prova telefonen på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar den där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan, tel 90200.

Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

GARANTI

DORO CARE har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med det inköpsställe där telefonen inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.

