


Bruksanvisning Doro RingPlus

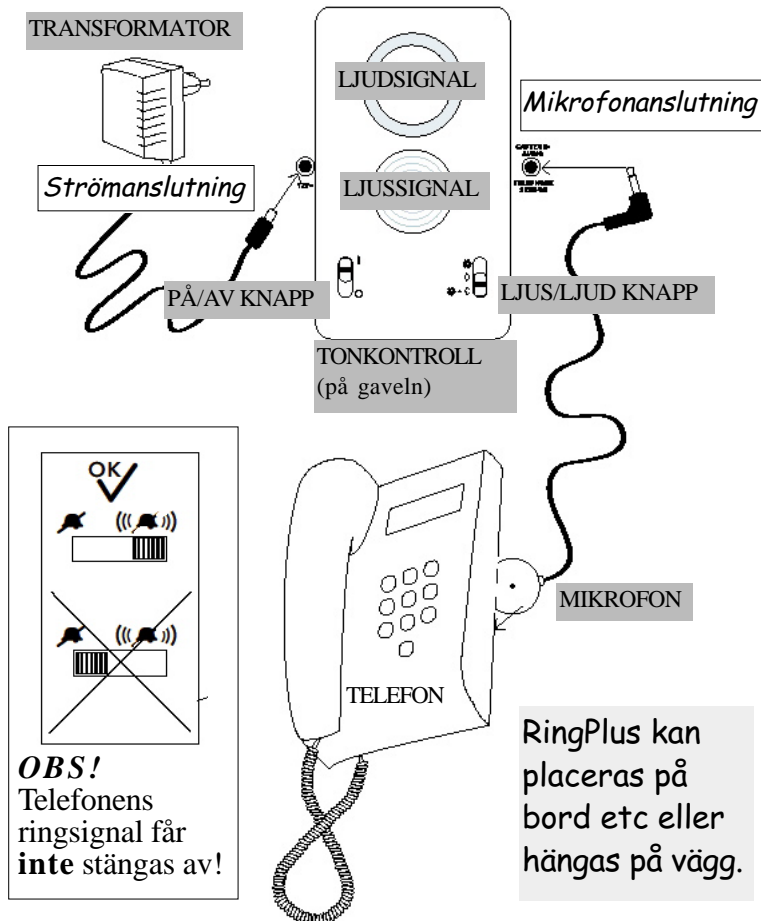

Ansluta RingPlus

- Sätt fast mikrofonen på telefonens undersida nära ringanordningen med 1 par av bifogade, självhäftande kardborrerundlar.
- Anslut proppen till uttaget på apparatens högersida. Sladden är 5 meter lång.
- Anslut transformatorns propp (12 VAC) till uttaget på apparatens vänstersida. Sätt transformatorn i ett lämpligt vägguttag.

Använda RingPlus

- Sätt på RingPlus med PÅ/AV knappen på apparatens vänstra framsida - läge I.
- Välj typ av signal med knappen på apparatens högra framsida. Knappen har följande 3 lägen:
 - Endast ljussignal
 - Endast ljudsignal
 - Ljus- och ljudsignal
- Med tonkontrollen kan ljudsignalen korrigeras med lite högre eller lägre tonhöjd.



När telefonen ringer, avges strax en ljusblixt och en tonstöt (om den är inställd så). Detta upprepas för varje ringsignal. Tonstöten har en nivå av >91 dB(A) på ett avstånd av 1 meter från ljudkällan.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

