

## Bruksanvisning Attainment GoTalk Button™



*Ett meddelande på högst 10 sekunder. GoTalk Button kan användas för personliga, intalade meddelanden, AKK, kognitivt minnesstöd, mm.*

• GoTalk Button är försedd med inbyggt magnetfäste, för att sätta upp den på metallunderlag, t ex kylskåp, plåttavlor mm. Den kan även bäras i ficka etc. Grönt plasthölje. Storlek: Diam. 56 x 20 mm. Vikt 20 gram.

### Använda GoTalk Button

Vid leverans är batteriet isatt men inte inkopplat. På baksidan finns batteriluckan och här sticker det ut en plastbit med röd text. Drag försiktigt ut plastbiten och batteriet är nu inkopplat. Följ sedan anvisningarna för att att spela in och läsa upp meddelandet.

### Spela in ett meddelande

1. Skjut **REC/PLAY** knappen (finns på baksidan) till läge **REC** för att spela in ditt meddelande.
2. Tryck på och håll nere stora "guldknappen" på framsidan. Tala in meddelandet (mikrofonen syns inte, men sitter under "guldknappen"). Prata på ett avstånd på c:a 10 cm. Släpp knappen när du är klar.
3. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa så länge det finns inspelningstid, dvs upp till c:a **10 sekunder**.
4. Skjut **REC/PLAY** knappen (finns på undersidan) till läge **PLAY** för att avsluta inspelningen.

### Spela upp ett meddelande

Tryck på och släpp "guldknappen" och meddelandet läses upp.

### Ersätta ett meddelande

Följ anvisningarna för "Spela in ett meddelande", ovan!


### Ta bort ett meddelande

I läge **REC**, tryck kort på "guldknappen". Meddelandet är nu borttaget.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

### Installera/byta batteriet

När ljudet inte längre låter bra vid uppläsning är det ett tecken på att batteriet behöver bytas. Ett inspelat meddelande finns kvar även efter batteribytet. För att byta batteriet, öppnar du luckan på undersidan med t ex en 1 krona - vrid något mindre än ett kvarts varv moturs - och ta bort luckan och det gamla batterierna. Sätt in ett nytt 3 volt Lithium knappcell, typ **CR 2016** med **plus**-sidan riktad uppåt.

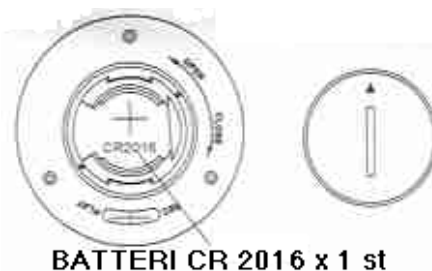

### Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

