

Tillägg för version 1.1+, för bruksanvisningen för GoTalk Overlay Software (GOS)

(Befintlig bruksanvisning beskriver version 1.1. Tillägget innehåller komplettering av nya överlägg t ex GoTalk20+ m fl samt "Ofta ställda frågor" FAQ.) På CD finns även följande PDF-filer: "Overlay Software Manual.pdf" (egelska versionen), "Addendum to the Manual.pdf" (egelska versionen av detta tillägg) samt bild/symbolöversikten "GoTalk Cells by Category.pdf". Den sistnämnda visar alla bilder som ingår i programmet.

Med den nya dialogboxen *Template Manager* kan överläggsstammar läggas till eller tas bort från snabbvalsraden. Första gången GOS körs, kommer Template Manager boxen att visa de olika överläggsstammarna och som kan väljas för de egna behoven av överlägg. Därefter, väljs *Template Manager* genom att välja **Select Templates** i **File** menyn.



Välj en apparat från listan **Available Templates** och klicka sedan på den högerpekande pilen för att flytta valet till listan **Selected Templates**.


Ta bort enheter från listan **Selected Templates** genom att markera en apparat och sedan klicka på den vänsterpekande pilen.

När listan **Selected Templates** innehåller de överläggsstammar du tänker använda, klickar du på **OK**

Om du öppnar en överläggsstam, som du ännu inte valt, kommer denna att installeras automatiskt.

När en ruta väljs i **Cell Browser** för att ingå i överlägget, kommer hela rutans innehåll (bakgrund, text och bild) att kopieras till överlägget och helt ersätta i rutan befintligt innehåll.

GOS justerar automatiskt storlek och placering av både text och bild, så att det passar överläggrutans format och form.

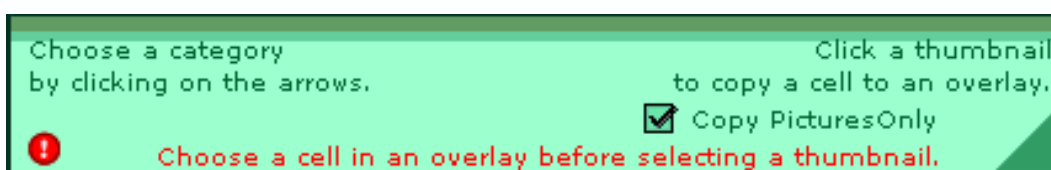

I version 1.1+, kan du välja att kopiera enbart bilden från en ruta i **Cell Browser**, genom att markera rknappen **Copy Pictures Only**, som är placerad nedtill i **Cell Browser**. Därefter kommer GOS att kopiera in bilder till valda rutor på överlägget, med det största formatet som passar i rutan.

Ofta ställda frågor - FAQ

• *Använda bilder från Internet etc?*

Lätt! Dra bilden från webb-läsaren till en mapp på hårddisken eller använd webb-läsarens kommando *Download Image to Disk* och spara bilden i din bildmapp. När du dubbel-klickar på en ruta på överlägget för att lägga in en bild, väljer du din bildmapp och den bild du laddade ner från nätet. GOS kan importera bilder i formatet JPEG, PNG och GIF. Dvs de tre vanligast förekommande bildformaten på nätet.

• *Varför är det olika layout för rutorna på skärmen resp. utskriften?*

Det är olika utseenden för redigeringsrutor på skärmen resp. utskriftsrutor. Rutorna vid utskrift är helt enkelt anpassade för överlaggets pappersformat, raster etc. Om utskriftslayouten användes på skärmen, skulle rutorna ligga för nära varandra och därmed försvåra redigeringsarbetet.

• *Varför är det fel utskriftsstorlek vid användning av Export Overlay?*

Vanligen beror detta på att programmet som använts för att öppna den exporterade filen inte använder rätt antal punkter/tum för det exporterade överlägget. Detta kan åtgärdas före utskrift genom att välja rätt värde. Leta i menyerna för grafikprogrammet efter funktioner som **Attributes** eller **Properties** eller **Resolution**. Om du kan - ändra till 72x72 punkter/tum. Avancerad program som Paint Shop Pro och Photoshop hanterar normalt detta automatiskt. Webb-läsare och program för att skriva ut foton eller fax, gör det som regel inte.

Om du inte kan ändra till 72x72 punkter/tum, finns det fortfarande en möjlighet genom att ändra i skrivarens **Page Setup** dialog. Om alternativet **Scale** finns, försök med att välja värdet 133% för överlägg som är för små respektive 75% för överlägg som skrivits ut för stort format.

En annan orsak för fel utskriftsstorlek kan vara att **Fit to Page** kryssrutan är bockad i **Page Setup**.

• *Varför är det fel utskriftsstorlek vid användning av GOS?*

Trots att överlägg som skrivs ut direkt med GOS har korrekt inställning av upplösningen, dvs 72x72 punkter/tum, ändock skriver ut i fel format, kan vara att **Fit to Page** kryssrutan (eller motsvarande alternativ) är bockad i **Page Setup**. Detta medför felaktigt utskriftsresultat.

• *Hur sparas filer till eller laddas från skrivbordet, när GoTalk File Selector används?*

GoTalk filväljare (*GoTalk File Selector*) har endast begränsad tillgång till skrivbordet. Om du föredrar att arbeta med filer som ligger direkt på skrivbordet, kan du låta bli att använda *GoTalk File Selector* och istället använda systemets vanliga dialoger för att välja filer.

Välj först **Preferences** i **File** menyn. Klicka på fliken **Editor**, och kryssmarkera sedan **Use System File Selector**. Klicka på **OK**, för att stänga inställningar. Nu kan du se och spara filer med de välbekanta dialogerna, som ger full åtkomst till filerna på skrivbordet.

• *Varför är en del bilder lågupplösta och andra skarpa och klara?*

Bilder som har transparenta ytor visas bara med skärmapplösningen.β

• *Varför försvinner bilder - men inte texter och linjer vid utskrift?*

Äldre skrivarrutiner är inte kompatibla med GOS, version 1.x. Besök skrivarefabrikantens hemsida för att updatera skrivarrutinerna. Du kan även exportera överläggsfilen till ett grafikprogram och skriva ut det från det programmet. (Se dock ovanstående frågor om felaktiga utskriftsformat etc!)

• *Varför saknas överläggsstammar (apparater) i min GOS?*

Från tid till annan kommer det ut nya apparater, som inte finns med på CD'n. Uppdateringar görs från Attainment's hemsida: **www.attainmentcompany.com** Välj: **GoTalk Overlay Software Update** och följ anvisningarna på skärmen.