



Manöverkontakter



Professionella, prisvärda produkter av mycket hög kvalitet för de barn som behöver vara fria från kablar för att fullt ut kunna använda leksaker, mm.

Trådlösa styrsystemet *Simply Works*

Styr datorn trådlöst!

Styr batteridrivna leksaker trådlöst!

Se separat produktblad!

- MOTTAGARE USB (Artnr 6510)**: En USB mottagare och interface som kan hantera upp till sex sändare samtidigt. Skallis och draghåll indikeras med lyddioder för att korrekta identifiering när flera användare använder mus- och tangentkontakter.
- TRÅDLÖS JOYSTICKMUS (Artnr 6468)**: Trådlös joystickmus med en räckvidd av upp till 10 meter. Ergonomisk och robust utformning. (Även Pretorian Optimas joystickmus kan användas med Simply Works mottagaren. Optimas mottagaren är dock inte kompatibel.)
- TRÅDLÖS DATORMUS (Artnr 4312)**: Trådlös datormus med rullball och med en räckvidd av upp till 10 meter. Ergonomisk och robust utformning. (Även Pretorian Optimas datormus kan användas med Simply Works mottagaren. Optimas mottagaren är dock inte kompatibel.)
- TANGENTBORD (Artnr 6512)**: Ett stort och robust tangentbord med stora tangenter och inbyggd Simply Works sändare. (Senast reviderad för utgåvan av 2011.)
- MOTTAGARE ENKEL (Artnr 4313)**: En 4-kanals mottagare för batteridrivna leksaker. Drivutgång. Kan användas tillsammans med valfri Simply Works sändare. Lätt format så att den kan sättas fast på leksaken.
- KONTAKTSÄNDARE 125 (Artnr 4311)**: En stor manöverkontakt (släsmeter 125 mm) med inbyggd sändare och enbart två profilt och låg ertvåriga tryckkraft. Ett antal kontaktfunktioner kan väljas med hjälp av den inbyggda sifferdisplayen. Finns i flera olika färger.
- MOTTAGARE STANDARD (Artnr 4313)**: En 4-kanals mottagare för kontaktförlorda utrustningar och batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans med valfri Simply Works sändare. Flera olika funktionslägen kan väljas, t.ex. direkt, väntande, tidfördröjt, mm. Lätt format så att den kan sättas fast på en leksak.
- SÄNDARE (Artnr 6511)**: En 4-kanals sändare som fungerar som interface mellan en valfri trådlös manöverkontakt och Simply Works MOTTAGARE. Ett antal kontaktfunktioner kan väljas med hjälp av den inbyggda sifferdisplayen.
- MOTTAGARE PRO (Artnr 4314)**: En 2-kanals mottagare för kontaktförlorda utrustningar och batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans med valfri Simply Works sändare. Flera olika funktionslägen kan väljas, t.ex. direkt, väntande, tidfördröjt, mm.

Gör dig fri från kablar till datorn - använd trådlös teknik!

Produkter för trådlös styrning av datorer, leksaker, olika klenspanningsapparater mm, som kallas **Simply Works**. **Simply Works** arbetar med kodade radiosignaler. Strömförsörjning görs med vanliga batterier (utom MOTTAGARE USB - som strömförjs av datorn). Räckvidd mellan sändare och mottagare är upp till 10 meter.

För att styra en dator kan följande delar (se bilden) ingå:

En MOTTAGARE USB (6 kanaler) som ansluts till en av datorns USB-portar. En TRÅDLÖS DATOR- eller JOYSTICKMUS (om t ex WiViK 3 används). Om särskilda knappfunktioner behövs (det finns ett urval att välja på) kan man komplettera med SÄNDARE (för valfri MK) eller KONTAKTSÄNDARE 125 samt även tre modeller av MOTTAGARE med slutande reläutgång, max 1 A/30 V. Batterier medföljer.



Mottagare USB

Mottagare USB ansluts till en USB port på datorn (även till Mac) enligt "plug and play" - inga extra drivrutiner behövs.

Mottagaren har 6 kanaler, vilket innebär att högst 6 olika Simply Works sändare-enheter kan tas emot för att styra datorns funktioner.

Mottagaren strömförsörjs av ansluten dator.

Funktioner - via mottagarenheter

Funktioner ställs in på Kontaktsändare 125 eller Sändare med knappen märkt **MODE**. En liten display visar vald funktion.

- 0 Switch/Gamepad 1
- 1 Switch/Gamepad 2
- 2 Switch/Gamepad 3
- 3 Switch/Gamepad 4
- 4 Mus/Vänster-klick
- 5 Mus/Höger-klick
- 6 Mus/Drag/håll
- 7 Tangentbord/Mellanslag (Space)
- 8 Tangentbord/Enter
- 9 Tangentbord/TAB
- A Tangentbord/F7 1)
- B Tangentbord/F8 1)
- C Tangentbord/Siffran 2 2)
- D Tangentbord/Siffran 3 2)
- E Tangentbord/Pil Upp
- F Tangentbord/Pil Ned
- G Tangentbord/Pil Vänster
- H Tangentbord/Pil Höger


1) Används tillsammans med t ex Clicker.
2) Används tillsammans med t ex IntelliTools och andra amerikanska programmakare.

Exempel på produkter:



Artikel	Pris	Pris inkl moms
Kontaktsändare 125, 4311	788:-	995:-
Mottagare Enkel, 4312	788:-	995:-
Mottagare Standard, 4313	892:-	1 115:-
Mottagare PRO, 4314	1 492:-	1 865:-
Paket (4311 + 4312), 4315	1 492:-	1 865:-
Trådlös datormus, 6468	1 692:-	2 115:-
Trådlös joystickmus, 6469	2 580:-	3 225:-
Mottagare USB, 6510	696:-	870:-
Sändare, 6511	788:-	995:-
Tangentbord, 6512		Fråga oss
Paket (6510 + 6511), 6515	1 392:-	1 740:-

När du vill ha mer info, priser eller köpa! Ring: 08-583 588 90, vardagar kl. 10 - 16

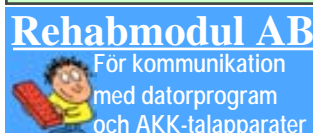

Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
info@rehabmodul.se www.rehabmodul.se

25% moms ingår i priserna. Frakt (och postförskottsavgift 70:-, vid order under 900:-) tillkommer.