

Bruksanvisning MULTI MEMO



Robust och lätttryckt talapparat. 6 minuter total taltid. Upp till 60 meddelanden kan inspelas. Vikt: 48 g. Format: Diam. 80x15 mm.

Artnr: 3510

Spela in ett meddelande

- Sätt ON/OFF knappen (undersidan) i läge ON.
- Tryck på **INSPELNING** knappen under hela inspelningen. LED tänds och ett pip hörs.
- Tala in i mikrofonen. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad. Ett pip hörs och LED släcks när du släpper knappen **INSPELNING**. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.
- Upprepa proceduren för ytterligare inspelningar, där senast inlästa meddelande kommer först.

Läsa upp ett meddelande

- Tryck på knappen **PLAY** och inspelat meddelande läses upp. Du kan avbryta uppläsningen med att trycka på **PLAY** igen.

Lokalisera ett meddelande


- Tryck på knappen **NÄSTA** eller **FÖREGÅENDE** och meddelandet läses upp. Upprepa vid behov.
- Du kan repetera meddelandet med knappen **PLAY**.
- Du kan hoppa fram till sista meddelandet genom att hålla **NÄSTA** nedtryckt i 3 sek. Hoppa fram till första meddelandet genom att hålla **FÖREGÅENDE** nedtryckt i 3 sek.

Ta bort ett meddelande

- Lokalisera meddelandet och tryck en gång på **RADERA**. LED blinkar till och ett pip hörs.

Ta bort alla meddelanden

- Tryck samtidigt på **RADERA** och **FÖREGÅENDE** under 15 sekunder. LED blinkar till och ett pip hörs.

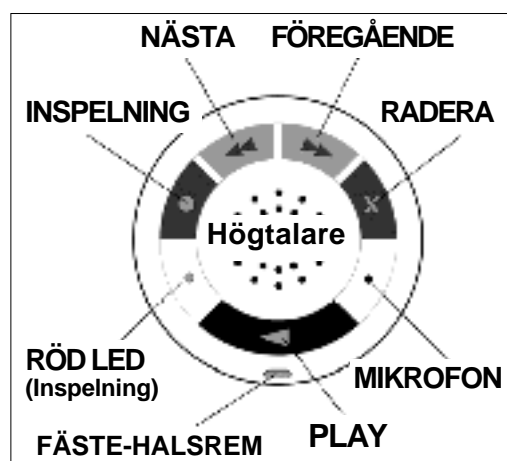

På undersidan:

- ON** = Multi Memo är PÅ
- OFF** = Multi Memo är avstängd
- LOCK** = Hindrar radering/ nyinspelning

Installera/byta batterier

Batterier är isatta. När ljudet inte låter bra är det tecken på att de behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle! Batterifacket är på talapparatens undersida.

- För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur skruven och lyfter upp/tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna).
- Sätt i 3 nya. *Glöm inte bort hur de ska sitta, släta sidan uppåt, mot skruvhålet.*
- Batteritypen är alkaliebatterier, LR44, m fl. (Även silveroxidbatterier -längre livslängd- kan användas, t ex SR44, AG13 m fl.)
- Sätt tillbaka luckan och skruva åt!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

