

# Talapparater för minnesstöd, AKK & träning - de flesta med bildstöd!



Alla talapparaterna är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Kan jag få kritorna ...

## One by Four Talker

4 stycken One Talker's med ett tåligt fodral med självhäftande plastfickor för bilder/ text på ovasidan. Med ett tryck på dessa, läses meddelandena upp. Fodralet har måtten (ca): 80 x 200 x 20 mm. Vikten är 595 gram. Clips medföljer. Svart/grå plast.

## StepPad

För egna inspelade steg-för-steg instruktioner - utan bildstöd. 72 sekunders minne som räcker till ca 15 korta meddelanden. Vikt: 60 g. Fickstorlek: 55 x 100 x 10 mm. Levereras med bältesclip och 4 st. SR44 batterier.



1. Hej Olle, ta på dig jackan innan du går ut...

2. Lås ytterdörren med långa nyckeln...



1. Värma lunchen

2. Ta ut maten från ... osv

## GoTalk Frame 6

GoTalk Frame 6 ett tåligt fodral med 6 st. GoTalk One. Används för AKK, läsa upp instruktioner, för träning när flera meddelanden behövs, mm. Inbyggt bordsstöd. Vikt: 680 g. Mått: 145 x 400 x 25 mm.

Så här fungerar GoTalk One

-ingår i GoTalk Frame 6:

- Sätt i en bild/foto i bildfickan. Sätt omkopplaren på apparatens baksida i läge RECORD.
- Tryck på uppspelningsknappen och tala in ett meddelande. Högst 10 sekunders längd.
- Sätt åter omkopplaren RECORD i PLAY-läge.
- GoTalk One (i resp. variant) är nu klar för användning!



**Familjebilder med tal!**  
Kan även användas på många andra sätt!



Bara din fantasi begränsar!

Här är jag och syrran i ...

## Talande fotoalbum

-Enkel att använda!

Spela in egna meddelanden på varje sida - högst 10 sek/sida.

Total inspelningstid är 4 minuter!

24 bildfickor i formatet 10 x 15 cm.

Vikt: C:a 400 g.

Mått: 140 x 200 x 33 mm.

2 batterier typ LR03 ingår.

ISO 22 21 09 och 22 27 15



### PRODUKTER

Talande fotoalbum  
One by Four Talker  
GoTalk Frame 6  
StepPad

### Artikelnummer

3502/83502  
3641/83641  
3643/83643  
3811

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikelnummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), One Talker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.

**Rehabmodul AB**  
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://Butiken) på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm