

Ordstrategi/PC - svensk version

Ordstrategi/PC är en Minspeak Application Program (MAP) som används i ett program från talapparaten Vantage som anpassats för körning i Windows. Detta nya AKK-program har fått namnet *SoftVantage*. Programmet är än utformat för att köras i valfri PC med Windows 98/ME/2000/XP. Som talutgång kan Användas t ex Infovox 330/Desktop/Desktop Standard V2/ Desktop PRO V2 eller annan SAPI talsyntes. Även inspelningar kan göras. Val görs via pekskärm, mus, huvudmus, musersättare eller scanning,

Ordstrategi/PC är till stora delar baserad på, med avseende på ordförråd och sekvenser, den version av Ordstrategi som utvecklats för DeltaTalker. Naturligtvis har en hel del förändringar skett med de nya möjligheter som står till buds.

Ordstrategi/PC består av följande delar:

Grundordförråd enligt *Minspeak* principerna:

1 ruts val - 31 ord och tecknet . (Totalt med aktiviteter och sidor: 2 428 ord.)

2 ruts val - 692 ord. (Totalt med aktiviteter och sidor: 3 089 ord.)

3 ruts val - 1 379 ord, varav minst 692 ord med 2 rutsval ingår. (Totalt med aktiviteter och sidor: 3 776 ord.)

Utformningen av Ordstrategi/PC är gjord så att brukaren kan växa i sitt hjälpmedel. Om man startar på låg nivå, dvs 1 ruts val kan man sedan gå upp till 2 ruts val och när kunskaperna finns fortsätta upp till 3 ruts val. Detta med i de flesta fall bibehållna sekvenser. *Man behöver inte lära om*, bara öka på ordförrådet. I bildbanken finns från början tillgång till över 2 400 svenska symboler/bilder (Totalt c:a 6 000.) Dessutom ingår 3 900 PCS färgbilder med svensk definition. Egna bilder i .bmp-form kan importeras till bildbanken.

Ordstrategi/PC är inte ett fixerat program. Man kan lägga till, ändra och ta bort. Precis efter behov och behag. Dessutom tillkommer möjligheterna till att stava, ordprediktion och mycket, mycket mer.

Antalet rutor är 45 (Se **OBS!** nedan) varav 32 används för grundordförråden. *Se vidare följande sidor!*

I grundordförrådet ingår även en demo med exempel, som kan förändras efter behov, för 4 rutor, 8 rutor och 15 rutor och endast 1 ruts val. *Se vidare följande sidor!*

Sidor, aktiviteter och dynamiska aktiviteter ingår

Utöver det Minspeakbaserade ordförrådet finns såväl sidor som aktiviteter/dynamiska aktiviteter. Dessa är alltid 1 ruts val. Inget av innehållet i dessa är fixerat, utan kan närsomhelst förändras, dvs läggas till, tas bort eller ändras avseende bilder/ord.

För närvarande ingår minst:

30 sidor med 885 olika ord/fraser för olika ämnesområden. *Se vidare följande sidor!*

53 kategorier med aktiviteter med 1 512 ord, som visas på tangtbordets översta rad. *Se vidare följande sidor!*







OBS! I samband med färdigställandet av *SoftVantage* med *Ordstrategi/PC* tillkom möjligheten att även använda 84 rutors överlägg. För 84 rutor kan vi än så länge bara hänvisa till amerikanska exempel. Kontakta oss för mer information.

Ordstrategi/PC - 1 ruts val

nu vill jag prata. ■

  Skift+lås
Skift
Ctrl

På översta raden visas aktiviteter/dynamiska aktiviteter

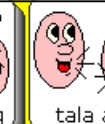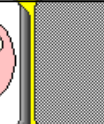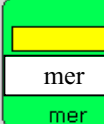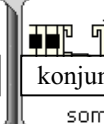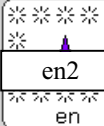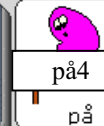 su-tecken	 sudda ord				 ta-mening	 tala allt		 stava
 pron/sub man	 verb är	 mer mer	 ned inte	 inuti i	 konjunk som	 pratar prata	 tv vad	 -sidor
 jag2 jag	 känslor vi	 ska ska	 ja tack ja	 har bara ha	 frit-hus var	 svensk lagom	 fråga så	 välj akt
 du är du	 min min	 de de	 nänä nej	 tidssche nu	 med med	 fårhage få	 rullsto3 kan	 su-senast
 bildlekt och	 hon två om	 en2 en	 det det	 på4 på	 vill vill	 laga här	 stopp .	 ren skä

BÖJNINGSMÖNSTER SAKNAS – Detta är 1-vals rutor
Kombinera med SIDOR och AKTIVITETER, som också är enkelval!

pron/sub = Bildens symbolnamn i bildbanken. (Den andra texten i rutan är meddelandet.)

Här ingår följande typ och antal av ord i grundordförrådet:

Adjektiv	2
Adverb	4
Frågeord	2
Konjunktioner	2
Prepositioner	3
Pronomen	8
Skiljetecken/funktioner	1
Utropsord	2
Verb	8

Totalt 32

Resterande ordförråd finns som 1 ruts val på *SIDOR* (-sidor) och uppgår till fn 885 och som *AKTIVITETER* (välj akt), som uppgår till 1 512. De 4 funktionerna finns i kolumn 9: - sidor, välj akt, su-senast (sudda senast) och ren skä (rensa skärm).

Ordstrategi/PC - 2 ruts val

jag borde ha det här hjälpmedlet. ■

För information om symbolnamn och böjningsmönster, se sidan 5 om Grundöverlägg!

Här ingår följande typ och antal av ord i grundordförrådet:

Adjektiv	21
Adverb	32
Fraser	373
Frågeord	18
Konjunktioner	11
Prepositioner	25
Pronomen	58
Substantiv	110
Skiljetecken/funktioner	4
Utropsord	2
Verb	38

Totalt 692

Resterande ordförråd finns som 1 ruts val på *SIDOR* (-sidor) och uppgår till fn 885 och som *AKTIVITETER* (välj akt), som uppgår till 1 512. De 4 funktionerna finns i kolumn 9: - sidor, välj akt, su-senast (sudda senast) och ren skä (rensa skärm).

Ordstrategi/PC - 3 ruts val



För information om symbolnamn och böjningsmönster, se sidan 5 om Grundöverlägg!

Här ingår följande typ och antal av ord i grundordförrådet:

Adjektiv	227	
Adverb	49	
Fraser	373	Identisk med 2 ruts val
Frågeord	18	Identisk med 2 ruts val
Konjunktioner	11	Identisk med 2 ruts val
Prepositioner	25	Identisk med 2 ruts val
Pronomen	58	Identisk med 2 ruts val
Substantiv	110	Som 2 ruts val men med andra placeringar

Skiljetecken/funktioner	4
Utropsord	2
Verb	502

Totalt 1379

Resterande ordförråd finns som 1 ruts val på *SIDOR* (-sidor) och uppgår till fn 885 och som *AKTIVITETER* (välj akt), som uppgår till 1 512. De 4 funktionerna finns i kolumn 9: - sidor, välj akt, su-senast (sudda senast) och ren skä (rensa skärm).

Grundöverlägg för 2- och 3 ruts val



2 RUTS VAL - BÖJNINGSMÖNSTER FÖR: SUBSTANTIV

obest sing	best sing	obest plur	best plur	obest sing	best sing	obest plur	best plur	SUB.
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------

3 RUTS VAL - BÖJNINGSMÖNSTER FÖR ORDKLASSERNA: SUBSTANTIV, VERB OCH ADJEKTIV

obest sing	best sing	obest plur	best plur	obest sing	best sing	obest plur	best plur	SUB.
infinitiv	presens	imperfekt	supinum	infinitiv	presens	imperfekt	supinum	VERB
vid behov	positiv	komparati v	superlativ	positiv	komparati v	superlativ	ADJEK.	

Kombinera med SIDOR och AKTIVITETER, som är enkelval!


pron/sub

Symboler markerade med denna färg finns även på överlägget för 1 ruts val (dock ibland med alternativt utförande och ibland även annan betydelse).

OBSERVERA!

RUTOR SOM ÄR MÖRKA ANVÄNDS INTE ÄNNU I NÅGON SEKVEN. DE KAN ALLTSÅ ANVÄNDAS NÄR MAN LÄGGER IN NYA, EGNA ORD OCH SEKVENSER!

Se vidare exemplen på de följande sidorna. Här framgår vilken metodik som använts i Ordstrategi/PC.

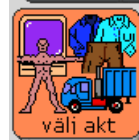

VÄLJ SIDOR -
EN ÖVERSIKTSSIDA
VISAS FÖRST

VÄLJ
AKTIVITET
MANUELLT

SUDDA SENAST
GJORDA VAL

TAR BORT ALLT
PÅ SKÄRMEN
OCH ÄVEN DET
SOM FINNS I
TALSYNTESEN

Adjektiv

ad.jektiv

Skift+lås
Skift
Ctrl
Tal

färger	ljust	mörkt	blå	brun	grå	grön	gul	fler
ledig	söt	frisk	många	stängd	nära	klok	välj akt	
mer	lagom	tyst	glad	ofta	våt	vanlig	möjlig	su-senast
mindre	ren	rolig	snabb	ren skå				

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 ruts val

ad.jektiv mat

Skift+lås
Skift
Ctrl
Tal

su-tecken	sudda ord	,	?	!	ta-mening	tala allt	stava
varm	varmare	varmast	sval	svalare	svalast	-sidor	
mer	het	hetare	hetast	kall	kallare	kallast	välj akt
lagom	tom	tommare	tommast	full	fullare	fullast	su-senast
mindre	ren skå						

3 ruts val

Adverb

adverb

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

apoteket	avdelning	bandaget	frisk	förkyld	huvudvärk	medicinen	mår illa	fler
stopp	än	då	inte	senare	snart	ändå	när som he	-sidor
här	noq	rätt	liksom	mycket	sedan	ju	hur	välj akt
där	alltså	helt	igen	nu	kanske	alltid	aldrig	su-senast
qärna	väl	bara	dit	så	hit	fel	helst	ren skå

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVENS.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Konjunktioner


konjunk

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

ambulans	bensinstati	bil	bilbälte	bilfärja	brandbil	bro	buller	fler
	att				som			-sidor
	också		och		men	om		välj akt
	både		för	innan	eller			su-senast
					sedan			ren skå

2 och 3 ruts val

Prepositioner

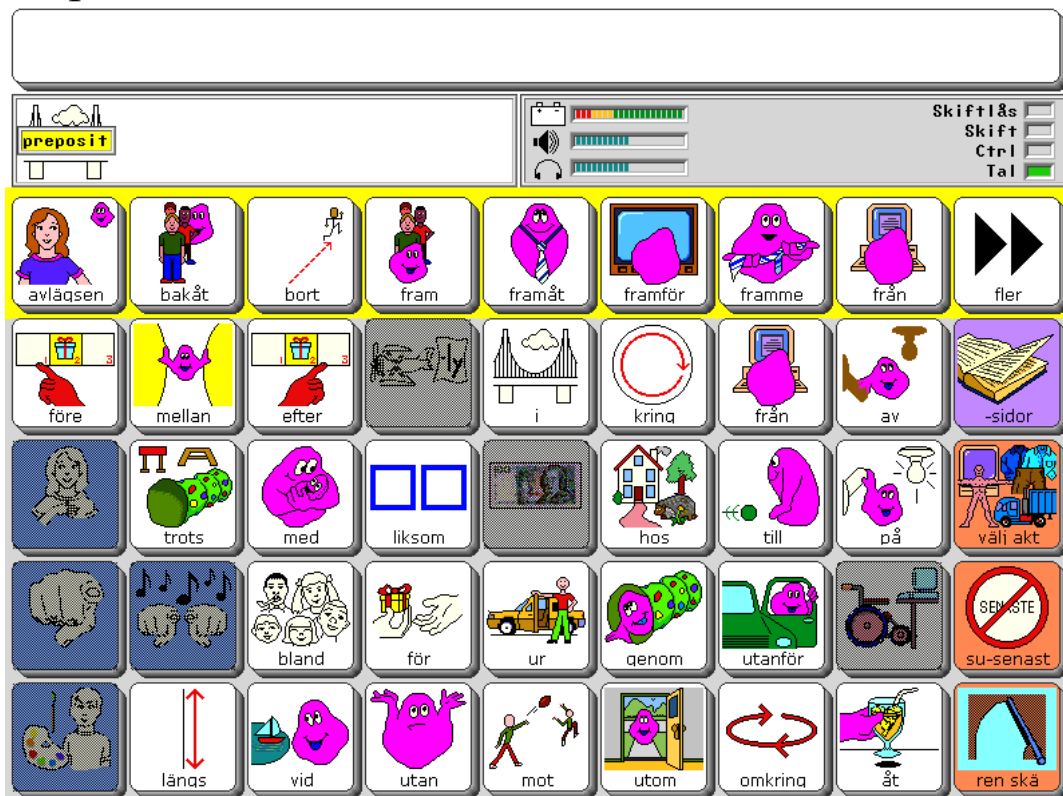

2 och 3 ruts val

OBSERVERA!
RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

Frågeord



2 och 3 ruts val

Substantiv

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

OBSERVERA!

NÄR SUBSTANTIV
VISAS, VISAS
OCKSÅ FRASER
SOM BYGGER PÅ
FORMEN:
hjälpverb + pronomen

Se vidare sidan 12!

2 ruts val (3 ruts val är ordnat i en annan form)

3 ruts val

Fler eksempel på substantiv:


anatomi




Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

 kroppen	 ankel	 ansikte	 arm	 armbåge	 axel	 ben	 blod	 fler
 kropp	 kroppen	 kroppar	 kropparna	 medicin	 medicinen	 mediciner	 medicinern	 -sidor
 skulle jag	 skulle vi							 väli akt
 skulle du	 skulle ni	 skulle de						 su-senast
 skulle han	 skulle hon	 skulle den	 skulle det					 ren skä

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKSENS.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKSENSER!

OBSERVERA!

OBSERVERA:
NÄR SUBSTANTIV
VISAS, VISAS
OCKSÅ FRASER
SOM BYGGER PÅ
FORMEN:
hjälpverb + pronomen

Se vidare sidan 12!

2 ruts val (3 ruts val är ordnat i en annan form)

väder

Skiiftläs
Skift
Ctrl
Tal

 blåsig	 fryser	 hett	 is	 kallt	 molnigt	 oväder	 regn	 fler
 väder	 vädret	 sak	 saken	 saker	 sakerna	 -sidor		
 måste jag	 måste vi	 måste du	 måste ni	 måste de	 måste han	 måste hon	 måste den	 måste det
 måste han	 måste hon	 måste den	 måste det	 ren ska	 su-senast	 ren ska		

2 ruts val (3 ruts val är ordnat i en annan form)

Verb

Verb

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

besöka	bära	gå	qömma	hoppa	krypa	köra	läqqa	fler
qår	qick	är	var	ha	hade	ringa	fråqa	-sidor
Namn heter	känner	äta	bli	köpa	bor	finns	förstår	välj akt
visa	prata	qillar	qe	ska	tror	få	kan	su-senast
måla	tvätta	vilar	öppna	leka	vill	qöra	åka	ren skå

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKvens.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKvensER!

2 ruts val

Verb

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

su-tecken	sudda ord	,	?	!	knock, knock ta-mening	tala allt	ABC	stava
äta	äter	ät	ätit	dricka	dricker	drack	druckit	-sidor
mata	matar	matade	matat	sluta	slutar	slutade	slutat	välj akt
torka	torkar	torkade	torkat	tuqqa	tuqqar	tuqqade	tuqqat	su-senast
qrilla	qrillar	qrillade	qrillat	svälja	sväljer	svalde	svalt	ren skå

3 ruts val

Pronomen

2 och 3 ruts val

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVENS.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

Fraser: Jag + hjälpverb

2 och 3 ruts val

OBSERVERA!

NÄR SUBSTANTIV
VISAS, VISAS
OCKSÅ FRASER
SOM BYGGER PÅ
FORMEN:
hjälpverb + pronomen

Se vidare sidan 9!

Fraser: Du + hjälpverb

du2

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

Hej!	Hej då!	Hejsan!	YES ja	nej	Ja tack!	Nej tack!	Jaq vet!	fler
Poss. din	du är	du var	du har varit	du har	du hade	du har haft	du tänker	-sidor
du själv		du ska	du skulle	du bör	du borde	du fick	du tänkte	välj akt
du			du	du håller p	du måste	du får	du kan	SEKASTE su-senast
		dina	ditt	du vill inte	du vill	du ville	du kan inte	ren skå

OBSERVERA!
RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Fraser: Han + hjälpverb

bildlekt

Skiftläs
Skift
Ctrl
Tal

adress	anteckna	bild	bildlekt	bildlärare	block	blyerts	brev	fler
Poss. hans	han är	han var	han har varit	han har	han hade	han har haf	han tänker	-sidor
han själv		han ska	han skulle	han bör	han borde	han fick	han tänkte	välj akt
			honom	han håller	han måste	han får	han kan	SEKASTE su-senast
han				han vill inte	han vill	han ville	han kan int	ren skå

2 och 3 ruts val

Fraser: Hon + hjälpverb

hon två

Skift+lås
Skift
Ctrl
Tal

bada	blöja	borsta tån	borste	deo	duscha	handduk	handfat	fler
Poss. hennes	hon är	hon var	hon har var	hon har	hon hade	hon har haf	hon tänker	-sidor
hon själv		hon ska	hon skulle	hon bör	hon borde	hon fick	hon tänkte	väl akt
			henne	hon håller	hon måste	hon får	hon kan	su-senast
	hon			hon vill inte	hon vill	hon ville	hon kan int	ren skä

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Fraser: Den + hjälpverb

den

Skift+lås
Skift
Ctrl
Tal

0	1	2	3	4	5	6	7	fler
en	den är	den var	den har var	den har	den hade	den har haf	den tänker	-sidor
den själv		den ska	den skulle	den bör	den borde	den fick	den tänkte	väl akt
			denna	den håller	den måste	den får	den kan	su-senast
	den	denne		den vill inte	den vill	den ville	den kan int	ren skä

2 och 3 ruts val

Fraser: Det + hjälpverb

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Fraser: Vi + hjälpverb

2 och 3 ruts val

Fraser: Ni + hjälpverb

ni

Skift+Lås
Skift
Ctrl
Tal

qitarr	instrument	lyssna	musical	musik	musik-anl	piano	sjunga	sång
Poss. era	ni är	ni var	ni har varit	ni har	ni hade	ni har haft	ni tänker	-sidor
ni själva		ni ska	ni skulle	ni bör	ni borde	ni fick	ni tänkte	välj akt
ni		er	ni håller på	ni måste	ni får	ni kan	su-senast	
eran	ert	ni vill inte	ni vill	ni ville	ni kan inte	ren skå		

OBSERVERA!

RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVEN.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Fraser: De + hjälpverb

de2

Skift+Lås
Skift
Ctrl
Tal

barn	barnbarn	bebis	bror	famili	farfar	farmor	kille	fler
Poss. deras	de är	de var	de har varit	de har	de hade	de har haft	de tänker	-sidor
de själva		de ska	de skulle	de bör	de borde	de fick	de tänkte	välj akt
de	dem	de håller p	de måste	de får	de kan	su-senast		
dess		de vill inte	de vill	de ville	de kan inte	ren skå		

2 och 3 ruts val

Fraser: Objekt

OBSERVERA!
RUTOR SOM
ÄR MÖRKA
ANVÄNDS
INTE ÄNNU I
NÅGON SEKVENS.
DE KAN ALLTSÅ
ANVÄNDAS NÄR
MAN LÄGGER IN
NYA, EGNA ORD
OCH SEKVENSER!

2 och 3 ruts val

Skiljetecken/Utropsord

2 och 3 ruts val (Välj "stanna")

Ordstrategi/PC - Sidor/Alltid 1 ruts val

Huvudsida - ingår i Ordstrategi/PC 1-, 2- och 3 ruts val

SIDOR SIDA

Skift+Lås
 Skift
 Ctrl
 Tal

arbete	böcker	dator	datum	drycker	famili	färg	handla	minspeak
hälsa	högtider	jag	klockan	kosmetika	kroppen	mat	matlagning	namn
näraord	relationer	siffror	snabbmat	sport	stavaabc	stavascan	telefon	tid
transport	tv	vad göra	väder					senaste
								ren skå

Exempel: Sidan *mat*

Kan jag få en varmkorv med mycket senap

Skift+Lås
 Skift
 Ctrl
 Tal

Kan jag få	smörgås	hamburgare	varmkorv	pizza	sallad	ja	nej	minspeak
kyckling	korv	kött	skinka	fisk	grönsaker	och	spaghetti	ketchup
lite	lagom	mycket	kaffe	mineralvatten	mjölk	saft	vatten	senap
dricka	hungrig	frukost	lunch	middag	frukt	dessert	kryddor	senaste
tack bra	inte ha	med	ost	ett ägg	pannkakor	sylt	smaskens	ren skå

Sidor visas alltid på egna sidor och väljs med rutan:



Återgång till grundöverlägget (Minspeak) görs med rutan:



Sidor i

Ordstrategi/PC

Kategorier: 30 st (fn)
 Antal ord/fraser: 885 st (fn)
 Antal ord/fraser anges inom parentes för varje kategori.

1. ARBETE (30)
2. BÖCKER (15)
3. DATOR (26)
4. DATUM (32)
5. DRYCKER (35)
6. FAMILJ (2)
7. FÄRG (19)
8. HANDLA (41)
9. HÄLSA (42)
10. HÖGTIDER (37)
11. JAG (11)
12. KLOCKAN (42)
13. KOSMETIKA (25)
14. KROPPEN (39)
15. MAT (42)
16. MATLAGNING (34)
17. NAMN (9)
18. NÄRA ORD (42)
19. RELATIONER (39)
20. SIFFROR (41)
21. SNABBMAT (41)
22. SPORT (36)
23. STAVA ABC (keyboard)
24. STAVA SCAN (keyboard)
25. TELEFON (33)
26. TID (34)
27. TRANSPORT (41)
28. TV (41)
29. VAD GÖRA (31)
30. VÄDER (25)

4/8/15 Demo

Dessutom tillkommer 138 sidor i 4/8/15 rutors demo. Uppskattat antal ord/fraser är över 1100 st. Se sidan 22!

Ordstrategi/PC - Aktiviteter/1 ruts val - ingår i 1-, 2- och 3 ruts val

Aktivitetsradens första 9 aktiviteter



Exempel: Verktøy (Se fler exempel på tidigare sidor!)



Aktiviteter i Ordstrategi/PC

Kategorier: **53** st (fn)

Antal ord/fraser: **1 512** (fn)

Antal ord/fraser anges inom parentes för varje kategori.

1. SNABBVAL (8)
2. VERKTYG (9)
3. ÄNDELSE (36)
4. ANTAL (10)
5. APPARATER (8)
6. BADA (13)
7. BERÄTTA (8)
8. DATOR (14)
9. DJUR (76)
10. DRYCKER (26)
11. FAMILJ (19)
12. FEST (9)
13. FORMAT (15)
14. FORMER (13)
15. FRASER (19)
16. FRUKTER (24)
17. FÄRGER (16)
18. GRÖNSAKER (19)

Aktiviteter visas alltid på översta raden och väljs med rutan användas sig av aktiviteter. Se



och genom att dynamiska nästa sida!

19. HEMELEKT (32)
20. HEMMA (46)
21. HJ-MEDEL (29)
22. HYGIEN (32)
23. HÄLSA (12)
24. HÖGTIDER (34)
25. KLÄDER (64)
26. KOM-PASS (19)
27. KROPPEN (54)
28. KÄNSLOR (28)
29. LEK&SPEL (118)
30. LÄNDER (26)
31. LÄSA (23)
32. MUSIK (9)
33. MÅLA&RITA (48)
34. MÅLTID (128)
35. MÖBLER (13)
36. NAMN/ÅLD (5)

37. NATUR (16)
38. PENGAR (32)
39. RELIGION (16)
40. RIKTNING (38)
41. RÖRELSE (15)
42. SAMHÄLLE (21)
43. SIFFROR (102)
44. SKOLAN (15)
45. SPORTER (24)
46. SÖMN (7)
47. TID/MÅN (31)
48. TOMT (1)
49. TRANSPORT (63)
50. VÄDER (20)
51. VÄXTER (4)
52. YRKEN (28)
53. ÅRET (17)

Ordstrategi/PC - Dynamiska aktiviteter/1 ruts val – ingår i 1-, 2- och 3 ruts val

Kategorier: 53 st (fn) (Samma antal som Aktiviteter)

Antal ord: 1 512 st (fn) (Samma antal som Aktiviteter)

A. Antal ord/fraser anges inom parantes för varje kategori.

B. **a:** anger vilken symbol eller symbolsekvens i respektive grundordförråd (Minspeak) som är kopplad till aktiviteten för att automatiskt visa denna på aktivitetsraden (översta raden).

1 ruts val

1. SNABBVAL (8) **a: stopp**
2. VERKTYG (9)
3. ÄNDELSE (36)
4. ANTAL (10)
5. APPARATER (8)
6. BADA (13)
7. BERÄTTA (8) **a: prata**
8. DATOR (14)
9. DJUR (76)
10. DRYCKER (26)
11. FAMILJ (19)
12. FEST (9)
13. FORMAT (15)
14. FORMER (13)
15. FRASER (19)
16. FRUKTER (24)
17. FÄRGER (16)
18. GRÖNSAKER (19)
19. HEMELEKT (32)
20. HEMMA (46)
21. HJ-MEDEL (29)
22. HYGIEN (32)
23. HÄLSA (12)
24. HÖGTIDER (34)
25. KLÄDER (64)
26. KOM-PASS (19) **a: rensa skärm**
27. KROPPEN (54) **a: i**

1 ruts val, forts.

28. KÄNSLOR (28)
29. LEK&SPEL (118) **a: med**
30. LÄNDER (26)
31. LÄSA (23)
32. MUSIK (9)
33. MÅLA&RITA (48)
34. MÅLTID (128)
35. MÖBLER (13)
36. NAMN/ÅLD (5)
37. NATUR (16)
38. PENGAR (32) **a: ha**
39. RELIGION (16)
40. RIKTNING (38)
41. RÖRELSER (15)
42. SAMHÄLLE (21)
43. SIFFROR (102)
44. SKOLAN (15)
45. SPORTER (24)
46. SÖMN (7)
47. TID/MÅN (31) **a: nu**
48. TOMT (1)
49. TRANSPORT (63)
50. VÄDER (20)
51. VÄXTER (4)
52. YRKEN (28)
53. ÅRET (17)

2 ruts val

1. SNABBVAL (8) **a: stanna**
2. VERKTYG (9)
3. ÄNDELSE (36) **a: pron/sub**
4. ANTAL (10)
5. APPARATER (8)
6. BADA (13)
7. BERÄTTA (8) **a: telefon**
8. DATOR (14) **a: rullsto3**
9. DJUR (76) **a: fårhage**
10. DRYCKER (26)
11. FAMILJ (19) **a: de2**
12. FEST (9)
13. FORMAT (15)
14. FORMER (13)
15. FRASER (19) **a: du2**
16. FRUKTER (24)
17. FÄRGER (16) **a: adjektiv**
18. GRÖNSAKER (19)
19. HEMELEKT (32) **a: tv**
20. HEMMA (46) **a: frit-hus**
21. HJ-MEDEL (29) **a: laga**
22. HYGIEN (32) **a: hon två**
23. HÄLSA (12) **a: adverb**
24. HÖGTIDER (34) **a: objekt2**
25. KLÄDER (64) **a: vilja**
26. KOM-PASS (19) **a: jag2**
27. KROPPEN (54) **a: anatomi**

Ordstrategi/PC - Dynamiska aktiviteter/1 ruts val – ingår i 1-, 2- och 3 ruts val, fortsättning

2 ruts val, forts.

28. KÄNSLOR (28) **a: vi**
29. LEK&SPEL (118) **a: det**
30. LÄNDER (26)
31. LÄSA (23) **a: fråga**
32. MUSIK (9) **a: ni**
33. MÅLA&RITA (48)
a: bildlekt
34. MÅLTID (128) **a: mat**
35. MÖBLER (13)
36. NAMN/ÅLD (5) **a: svensk**
37. NATUR (16)
38. PENGAR (32) **a: pengar**
39. RELIGION (16)
40. RIKTNING (38) **a: preposi**
41. RÖRELSER (15) **a: verb**
42. SAMHÄLLE (21)
43. SIFFROR (102) **a: den**
44. SKOLAN (15)
45. SPORTER (24) **a: sporter**
46. SÖMN (7)
47. TID/MÅN (31) **a: tidssche**
48. TOMT (1)
49. TRANSPORT (63)
a: konjunk
50. VÄDER (20) **a: väder**
51. VÄXTER (4)
52. YRKEN (28)
53. ÅRET (17)

3 ruts val

1. SNABBVAL (8) **a: stanna**
2. VERKTYG (9)
3. ÄNDELSER (36) **a: pron/sub**
4. ANTAL (10) **a: det**
5. APPARATER (8) **a: tv tv**
6. BADA (13)
7. BERÄTTA (8) **a: telefon**
8. DATOR (14) **a: rullsto3**
9. DJUR (76) **a: fårhage**
10. DRYCKER (26)
11. FAMILJ (19) **a: de2**
12. FEST (9)
13. FORMAT (15) **a: preposi**
14. FORMER (13) **a: adverb**
15. FRASER (19) **a: du2**
16. FRUKTER (24)
17. FÄRGER (16) **a: adjektiv**
18. GRÖNSAKER (19)
19. HEMELEKT (32) **a: tv**
20. HEMMA (46) **a: frit-hus**
21. HJ-MEDEL (29)
a: rullsto3 rullsto3
22. HYGIEN (32) **a: hon två**
23. HÄLSA (12)
a: anatomi anatomi
24. HÖGTIDER (34) **a: objekt2**
25. KLÄDER (64) **a: vilja vilja**
26. KOM-PASS (19) **a: jag2**
27. KROPPEN (54) **a: anatomi**
28. KÄNSLOR (28) **a: vi**
29. LEK&SPEL (118)
a: sporter sporter

3 ruts val, forts.


30. LÄNDER (26)
a: svensk svensk
31. LÄSA (23) **a: fråga**
32. MUSIK (9) **a: ni**
33. MÅLA&RITA (48)
a: bildlekt
34. MÅLTID (128) **a: mat**
35. MÖBLER (13)
a: frit-hus frit-hus
36. NAMN/ÅLD (5) **a: vilja**
37. NATUR (16)
a: fårhage fårhage
38. PENGAR (32) **a: pengar**
39. RELIGION (16)
a: väder väder
40. RIKTNING (38)
a: stanna stanna
41. RÖRELSER (15) **a: verb**
42. SAMHÄLLE (21) **a: svensk**
43. SIFFROR (102) **a: den**
44. SKOLAN (15) **a: fråga fråga**
45. SPORTER (24) **a: sporter**
46. SÖMN (7)
47. TID/MÅN (31) **a: tidssche**
48. TOMT (1)
49. TRANSPORT (63) **a: laga**
50. VÄDER (20) **a: väder**
51. VÄXTER (4)
52. YRKEN (28) **a: laga laga**
53. ÅRET (17)
a: tidssche tidssche

Ordstrategi/PC - 4/8/15 Demo/Alltid 1 ruts val




138 sidor 4/8/15 rutors demo ingår. Uppskattat antal ord/fraser är över 1100 st. Följande kategorier ingår (rutstorlek anges först):

1. 4 SMÅBARN (antal egna sidor 6)
2. 8 BARN (antal sidor 69*)
3. 8 UNGDOM (antal sidor 69*)
4. 8 VUXNA (antal sidor 69*)
5. 8 SCA/INFO (antal egna sidor 9)
6. 15 UNGDOM (antal egna sidor 38)
7. 15 VUXNA (antal egna sidor 16)

*) Använder dels egna sidor och samt generella sidor inom gruppen 8 rutor.

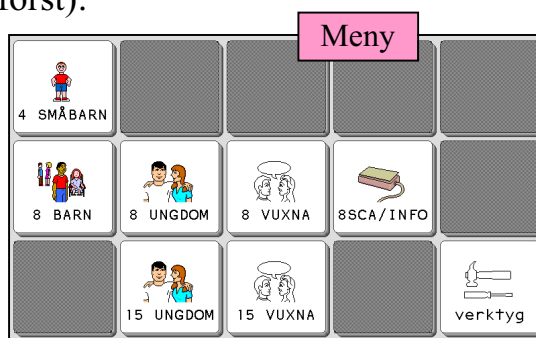

Se här några få exempel på demo-överlägg!

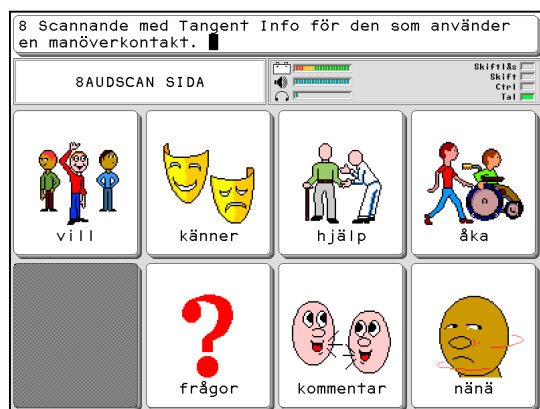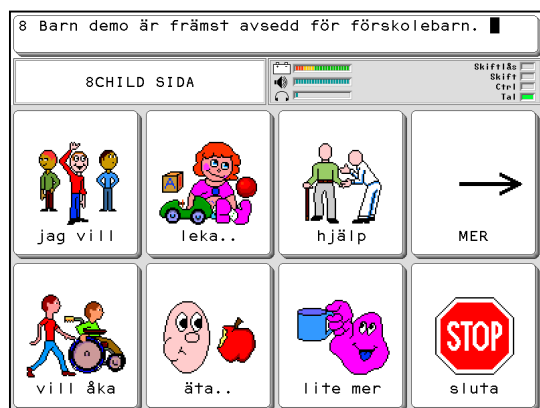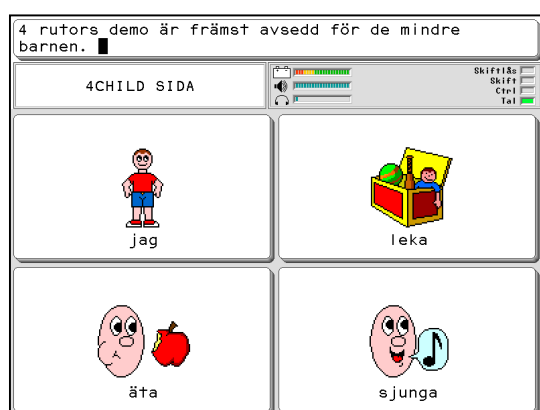


*I 4/8/15 Demo är det även här endast 1 ruts val. Allt kan ändras: Lägg till; Ta bort; Ändra bilder och/eller ord och meddelanden. **Inga begränsningar!***




Något om verktygslåda och verktyg

I sedvanlig (PRC) ordning görs inställningar etc i Verktygslådan, som visas på bilden.

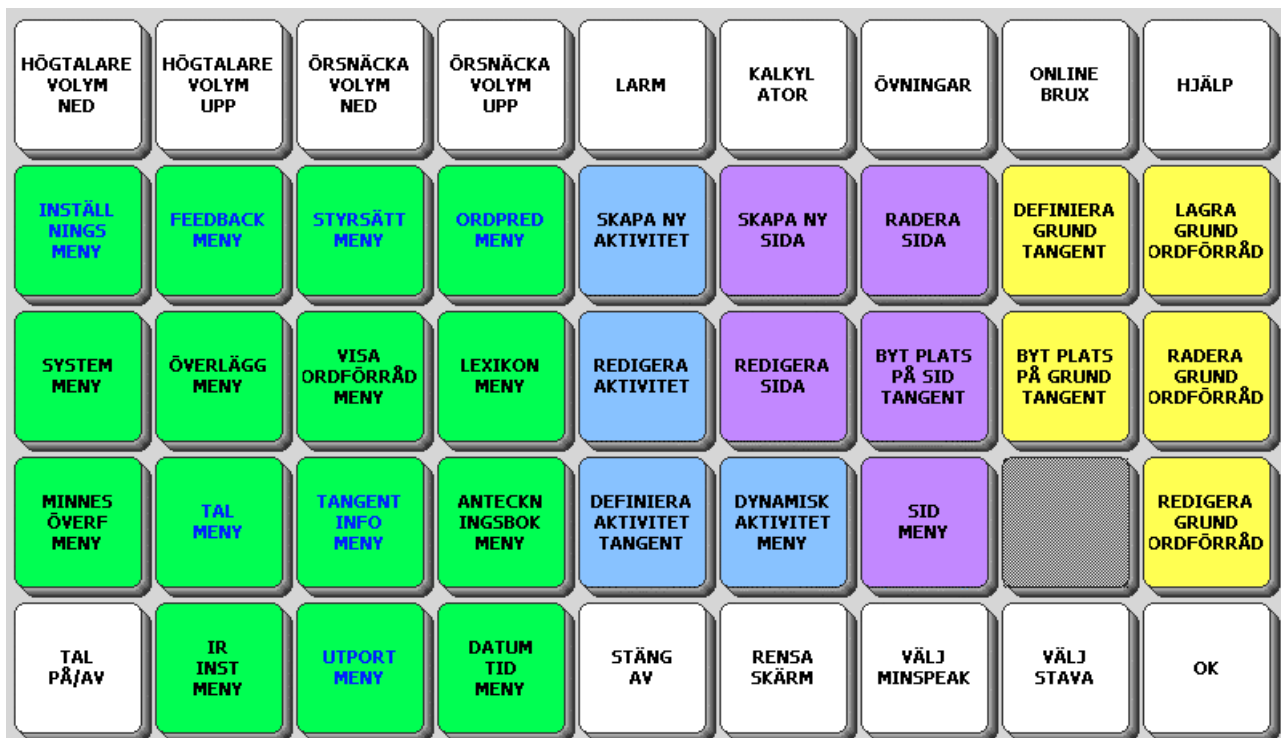


När verktyget "VÄLJ STAVA" väljs visas ett tangentbord som används i samband med inskrivning av text för sekvenser, men även vid stavning i samband med att man arbetar i Minspeak.

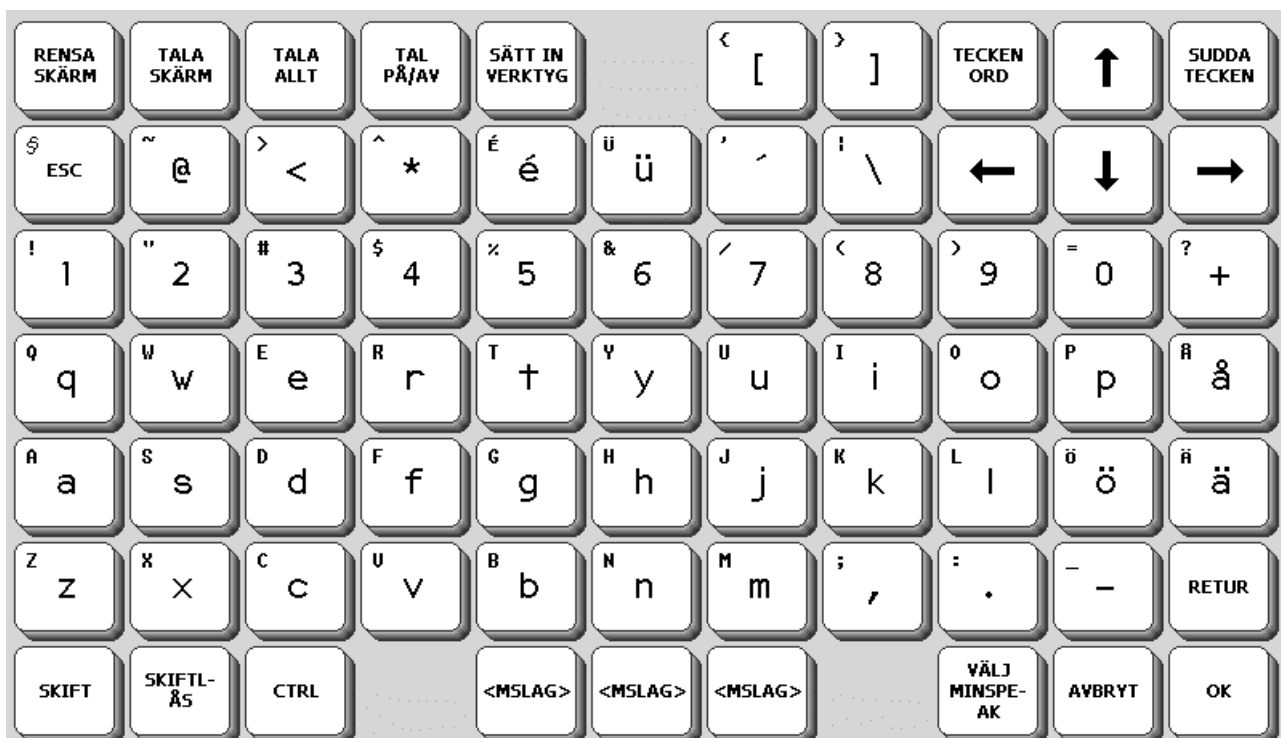


Feedback meny

Här görs olika inställningar, för att anpassa till behov och kunnande.

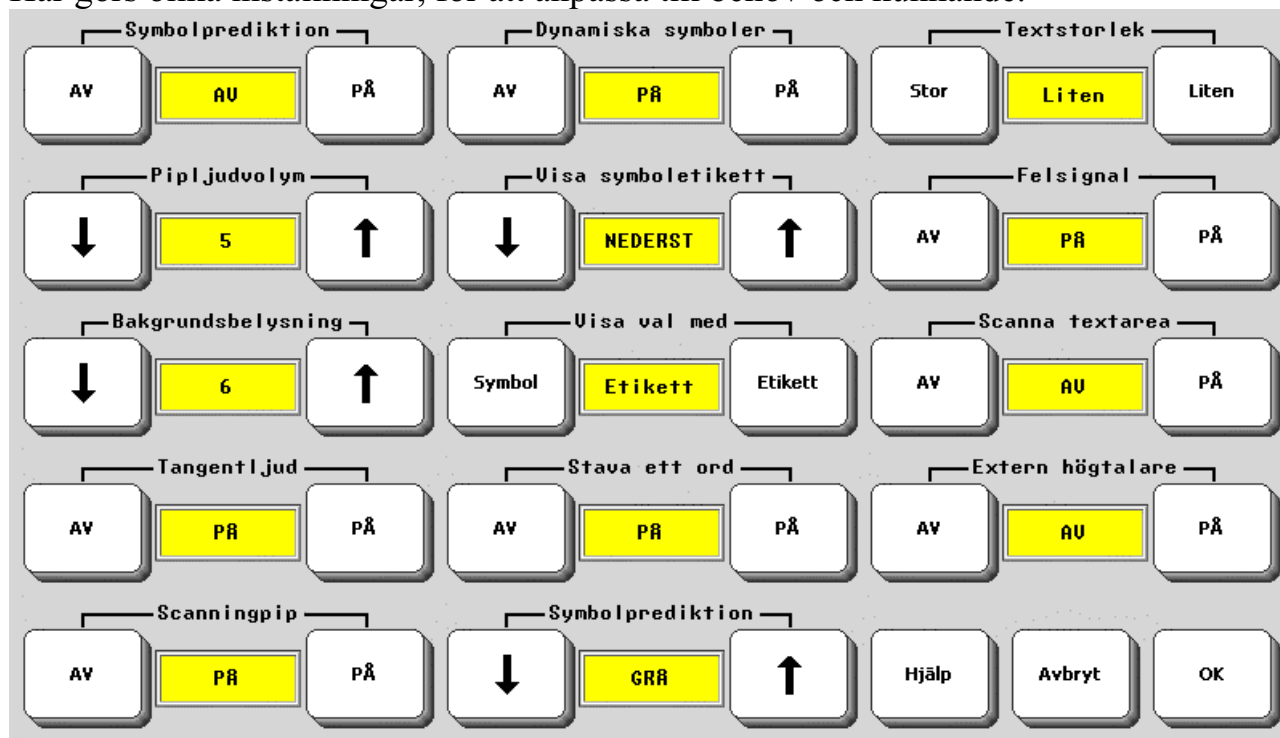


Exempel på fler verktyg:

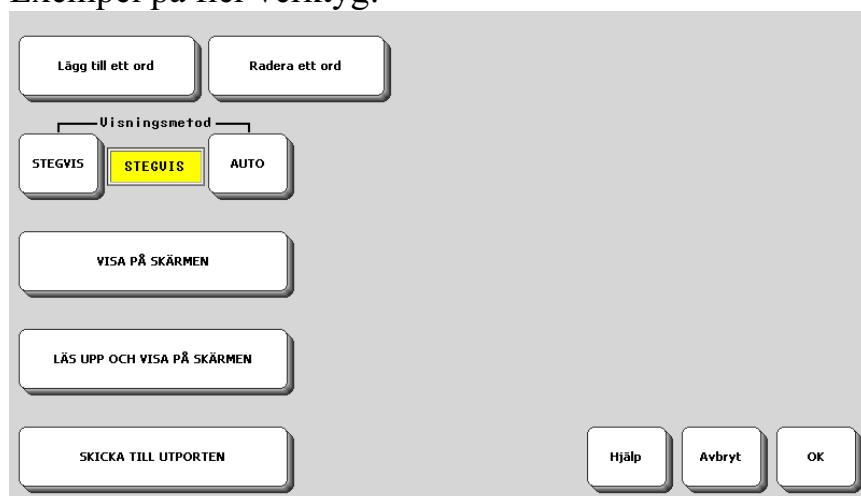

LEXIKON MENY

Här gör man anvisningar för talsyntesen hur den ska uttala ord (om de är felaktigt uttalade).

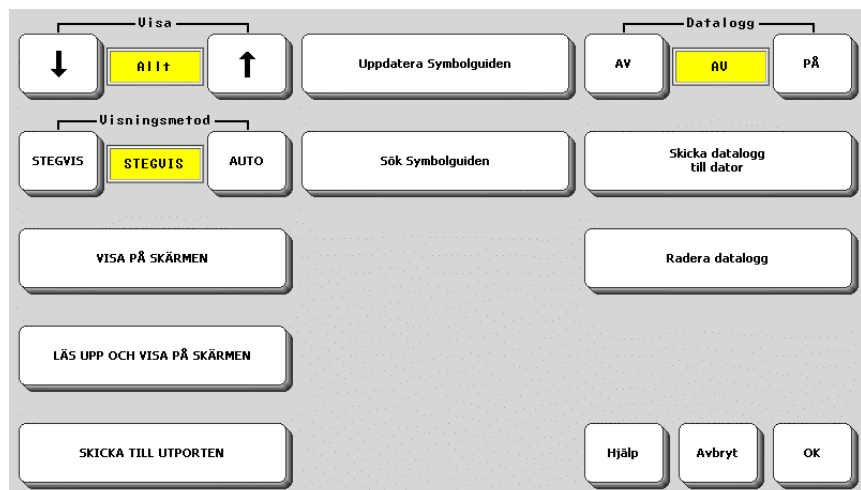

VISA ORDFÖRRÅD MENY


Här kan man granska vad som är inlagt. Alla ord och sekvenser på grundöverläggen men också på sidor och aktiviteter.

OBSERVERA!

Vid leverans av Ordstrategi/PC medföljer listor (.pdf) på alla inlagrade ordförråd.

Till sist - inte bara bildkommunikation:


Stavning

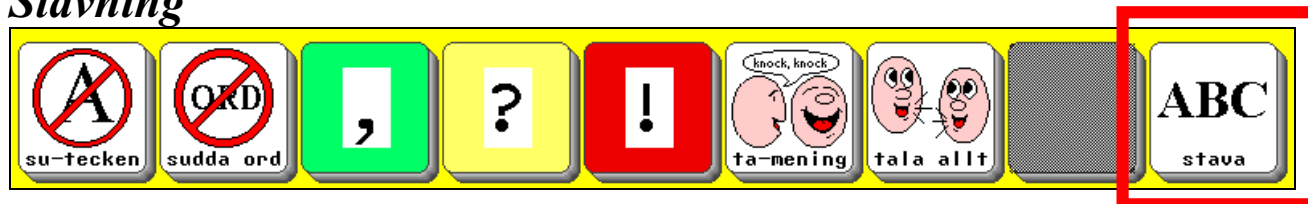

Om funktionen "Stava ett ord" är på (FEEDBACK MENYN) kan man i Minspeak läget välja rutan "ABC stava". Då visas tangentbordet som omnämns på sidan 23. Nu kan man skriva ett önskat ord, göra mellanslag och automatiskt komma tillbaka till Minspeak.

Ordprediktion

Om funktionen "Ordprediktion" är på kan man i samband med skrivning av text få ordprediktion. C:a 6000 svenska ord ingår vid leveransen. Ord kan läggas till/tas bort.

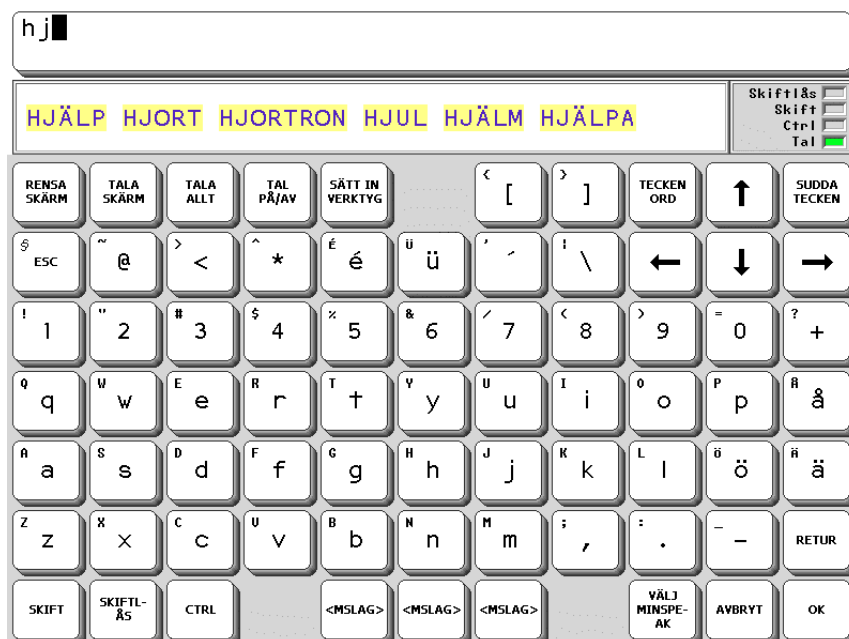

Flera stavningsöverlägg

Ytterliggare två stavningsöverlägg ingår, som kan styras med scanning. Ett är ordnat i ABC ordning resp. det andra i frekvensordning. Överläggen finns som sidor.



Om mer information önskas, kontakta:

Rehabmodul AB, Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby, tel: 08-583 588 90

Du kan också kontakta oss via hemsidan: www.rehabmodul.se

