

Bruksanvisning Pratlåda - 6 färger



Artnr:

3510-osorterade färger (någon/några av röd, orange, grön, blå, lila, gul)

3516- 6 pack

Mycket gedigen, robust och lätttryckt talapparat. En bild kan läggas under locket. Gör en egen inspelning - 30 sekunder! Bildformatet är c:a 65 x 65 mm. Nyckelhålsfästen för eventuellt väggmontage. Vikt: 120 g. Format: 85 x 85 x 25 mm.

Spela in ett meddelande

- Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
- Tryck på knappen under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst 30 sekunder. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

Läsa upp ett meddelande


Tryck på knappen och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!

Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

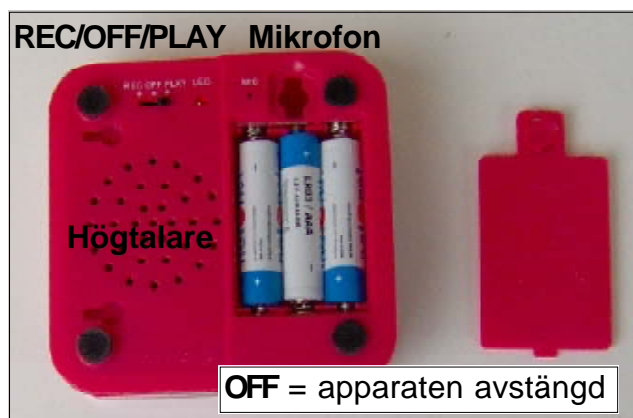

Installera/byta batterier


Du måste sätta i batterier LR03 / AAA, för att använda Pratlådan. Batterifacket sitter på talapparatens undersida. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle!

- För att sätta i/byta batterierna, vrider du låset ett kvarts varv och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA (se markeringarna). Sätt tillbaka luckan och vrid låset ett kvarts varv.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

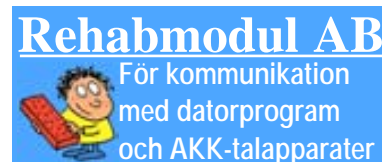

© Copyright 04/2020, Rehabmodul AB, Stockholm