

Bruksanvisning Pratpuck/Pratpuck PRO/Tallist



Gedigen, robust och lättryckt talapparat med högt, klart ljud. Gör en egen inspelning - 10 sek.! 5 färger. *Pratpuck PRO* kan lagra 30 sek. och har svart lock. Vikt: 27g. Format: diam. 47 x 27 mm.

Spela in ett meddelande

- Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
- Tryck på knappen under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. (PRO 30 sek.). Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

Läsa upp ett meddelande


Tryck på knappen och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!

Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

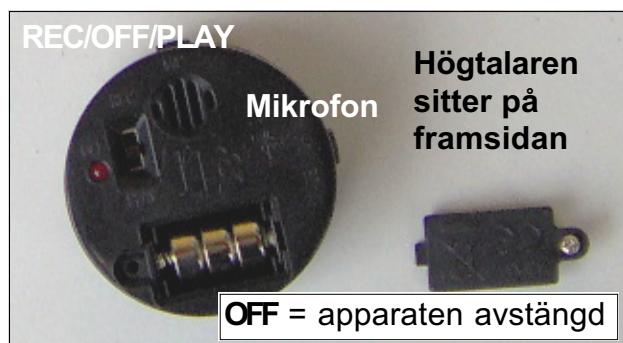

Installera/byta batterier

Du måste sätta i medföljande batterier, för att använda *Pratpuck*. Batterifacket sitter på talapparatens undersida. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle!

- För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nya knappceller. *Glöm inte bort hur de ska sitta, dvs med släta sidan mot skruvhålet.* Batteritypen är silveroxid och beroende på fabrikat: SR44, AG13, D357, V357, 357, m fl. (Även alkaliebatterier kan användas, LR44, m fl.) Mått: diam. 11,6 x 5,4 mm samt 1,5 volt. Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven.



Tallist - ram med 5 pratpuckar (10 sek.)

Alla 5 färgerna. Kan väggmonteras. Se *Pratpuckar!*



Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

