

# Rehabmodul AB Snabbguide Simply Works

©: Rehabmodul AB, 09/2015

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

- Kontaktsändare 125
- Kontaktsändare 125
- Mottagare Enkel
- Mottagare USB

Brukarstöd: [support@rehabmodul.se](mailto:support@rehabmodul.se)

## Trådlös styrning av datorfunktioner

CE certif. enl. direktiv 89/336/EEC.  
2 års garanti för produktfel.

### Kompatibilitet

Mottagare USB kan användas med USB kompatibla datorer. Detta innebär de flesta PC med Windows samt Apple.


### **Avfallshantering**

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

## Sändare

Artikelnummer 6511.

1-kanals sändare som fungerar som länk mellan en valfri trådad manöverkontakt (säljs separat) och en Simply Works MOTTAGARE. Format 92x67x21 mm. Vikt c:a 90 g. Batterier 2xLR03/AAA medföljer.

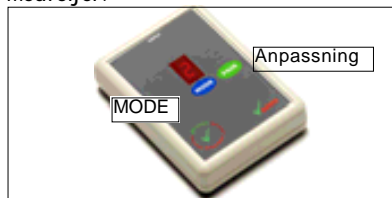

### Sätt i batterier

- Vänd mottagaren upp och ner och ta bort batteriluckan.
- Sätt i 2 st LR03 alkalinebatterier i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- Det finns ingen huvudströmbrytare.
- **Gå vidare till Mottagare Enkel och/eller Mottagare USB!**

## Kontaktsändare 125

Artikelnummer 4311.

En stor (diam. 120 mm) manöverkontakt och låg profil (29 mm) med inbyggd 1-kanalssändare. Liten tryckkraft behövs. Vikt ca 150 g. Batterier 2xLR03/AAA.



### Sätt i batterier

- Vänd K 125 upp och ner och ta bort batteriluckan. (Skruvmejsel behövs.)
- Sätt i 2 st LR03 alkalinebatterier i batterifacket. Sätt tillbaka luckan och skruven.
- Det finns ingen huvudströmbrytare.
- **Gå vidare till Mottagare Enkel och/eller Mottagare USB!**

## Mottagare Enkel

Artikelnummer 4312.

1-kanals mottagare för bl a batteri-drivna leksaker. Slutande reläutgång, max 1 A/30 V. Kan användas med valfria Simply Works sändare. Litet format 92x67x21 mm. Vikt c:a 90 gram. Batterier 2xLR03/AAA medföljer.



### Sätt i batterier

- **Se: Sändare** (till vänster)!
- **Gå vidare till Anpassning (Pair)!**


## Mottagare USB

Artikelnummer 6510.

Mottagaren ansluts till en USB-port på datorn (även Apple) enligt "plug and play" - inga extra drivrutiner behövs.

Mottagaren har 6 kanaler, vilket innebär att upp till 6 olika Simply Works sändarenheter kan tas emot för att styra datorns olika funktioner.

Mottagaren strömförsörjs av datorn.

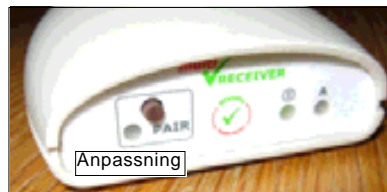

- Datorn ska vara på och körklar när du ansluter Mottagare USB till en ledig USB port på datorn.
- Mottagaren skickar automatiskt ett antal drivrutiner till datorn, vilket kan ta upp till en minut. När detta är klart lyser **Pair** lysdioden under c:a 5 sek.
- För att få bästa räckvidd för överföringen ska mottagaren inte placeras bakom datorn eller nära stora metallföremål eller intill strålände apparater som mobiltelefoner, trådlösa telefoner, trådlösa nätverk, etc.
- **Gå vidare till Anpassning (Pair)!**

## Anpassning (Pair)

Innan mottagaren kan användas, måste den anpassas (Pair) till den sändande enheten, här **Sändare** eller **Kontaktsändare 125 (K 125)**.

- 1 Lägga **Sändare/K 125** bredvid Mottagare Enkel.
- 2 Tryck kort på **Pair**-knappen på mottagarens framsida. Lysdioden blinkar.

- 3 I nom 10 sek. - tryck kort på **Pair** - knappen - framsidan på **Sändare** resp. undersidan på **K 125**.
- 4 Efter en kort stund ska lysdioden lysa med fast sken under c:a 5 sek.
- Anpassningen är klar!

*Du behöver inte välja något med **Mode**-knappen, när du använder Mottagare Enkel tillsammans med t ex en batteridriven leksak/annan apparat.*

**Göra om hela anpassningen (Pair)**  
Om det finns orsak att göra om anpassningen, ska **PAIR**-knappen hållas intryckt c:a 3 sek., tills lysdioden blinkar snabbt.

## Funktioner (MODE)

Funktioner - via mottagarenheter ställs in på Kontaktsändare 125 eller Sändare med knappen märkt **MODE**. En liten display visar vald funktion.

0	Switch/Gamepad 1	
1	Switch/Gamepad 2	
2	Switch/Gamepad 3	
3	Switch/Gamepad 4	
4	Mus/Vänster-klick	
5	Mus/Höger-klick	
6	Mus/Drag/håll	
7	Tangentbord/Mellanslag (Space)	
8	Tangentbord/Enter	
9	Tangentbord/TAB	
A	Tangentbord/F7	1)
B	Tangentbord/F8	1)
C	Tangentbord/Siffran 2	2)
D	Tangentbord/Siffran 3	2)
E	Tangentbord/Pil Upp	
F	Tangentbord/Pil Ned	
G	Tangentbord/Pil Vänster	
H	Tangentbord/Pil Höger	

- 1) Används tillsammans med t ex Clicker.
- 2) Används tillsammans med t ex Intellitools och andra amerikanska programmakare.

## Felsökning

*Om det inte fungerar - följ guiden för att lokalisera och åtgärda felet. Kvarstår felet, kontakta Rehabmodul, innan retur görs.*

Inget händer - lysdioden slocknar inte  
- Enheterna är inte anpassade. Gör anpassning enligt proceduren i **Anpassning**.

Inget händer - lysdioden lyser inte  
- Enheterna är inte korrekt anpassade. Gör anpassning enl. proceduren i **Anpassning**.

Opålitlig eller sporadisk funktion  
- Batteriernas i sändaren är dåliga. Byt batterier!  
- Placera mottagaren bort från metallföremål och inom synligt område.  
- Utom räckvidd. Placera sändaren närmare mottagaren.

Enheterna går inte att anpassa - lysdioden släcks efter 30 sek och inget händer

- Batteriernas i sändaren är dåliga. Byt batterier!  
- Se till enheterna inte är längre ifrån varandra än 1 meter vid anpassningen.

## Lite mer om anpassning

Anpassning (PAIR) mellan mottagare och sändare görs med ett system av unika adresser, för att förhindra påverkan av störningar. Sändaren skickar en adresserad signal och mottagare reagerar endast på den signalen.

För korrekt funktion, måste sändar- och mottagarkanal ha samma adress. Adressen finns kvar även efter strömbortfall. Proceduren är automatiserad. Om lysdioden slutar blinka utan att ha lyst med fast sken, ska proceduren upprepas **från punkt 2**. Om det fortfarande inte fungerar - Se avsnittet: **Felsökning!**