

## Bruksanvisning Talstapel



Mycket gedigen, robust och lätttryckt talapparat. Bild kan läggas in i varje fack. Bildformatet är 80 x 70 mm. Avsedd för många ändamål - såväl personliga som allmänna. Nyckelhålsfästen för väggmontage (h/I). Inspelningstiden är 10 sek./ruta. Vikt: 630 g. Format: 560 x 116 x 27 mm.

### Spela in meddelanden

- Sätt **OFF/REC/PLAY** knappen i läge **REC**.
- Tryck på en knapp och håll den intryckt under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst 10 sekunder. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt **OFF/REC/PLAY** i läge **PLAY**.



### Läsa upp meddelanden

Tryck på en knapp och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

### Spela över meddelanden

Följ proceduren enligt ovan!

### Ta bort meddelanden

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

### Installera/byta batterier

Du måste sätta i medföljande batterier, för att använda Talstapeln. Batterifacket sitter på talapparatsens undersida. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle!



- För att sätta i/byta batterierna, vrider du låset ett kvarts varv och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA (se markeringarna). Sätt tillbaka luckan och vrid låset ett kvarts varv.

### Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

