


Huvudmus - Tracker PRO



Tracker PRO huvudmus är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Tracker PRO är en hands-free datormus, som omvandlar kroppsrörelser till förflyttningar av musmarkören i en dator. Den används istället för en standard datormus.

2 knapps
datormus

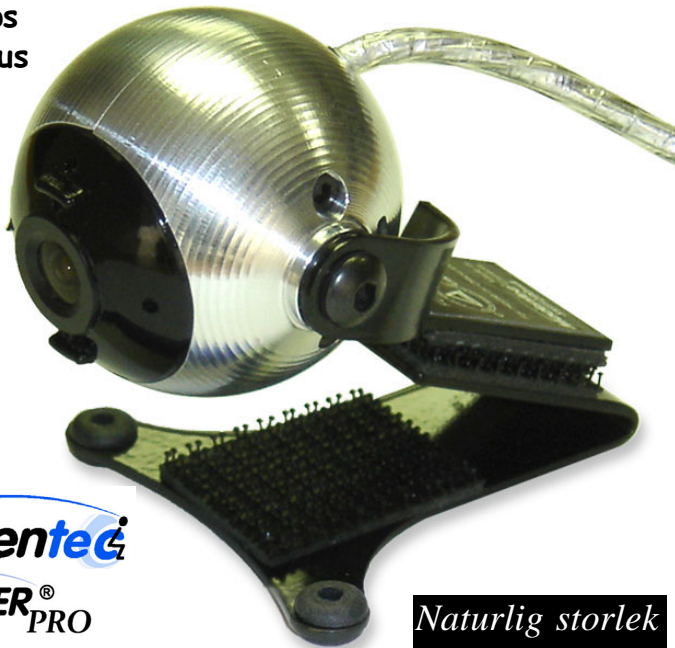

Madentec
TRACKER[®]
PRO

Naturlig storlek



Automatiskt klick - Magic Cursor 2000



Tracker PRO kan användas med valfri klick-enhet. För brukare med mycket begränsad motorik kan programmet Madentec Magic Cursor användas. Med Magic Cursor 2000 erhålls automatiskt klick, dubbelklick mm.

En 30 dagars demo kan GRATIS laddas ner från:

www.rehabmodul.se

- Tracker PRO är en *hands-free datormus*, som omvandlar kroppsrörelser till förflyttningar av musmarkören. Ingen handrörelse görs, vilket är bra för den som har begränsad motorisk rörelseförmåga, musarm etc. Tracker PRO har hög precision och används till valfria tillämpningar.
- Tracker PRO har en inbyggd *detektor* som känner av en *reflexpunkt*, som kan appliceras på pannan, glasögonbåge etc. När huvudet rörs, flyttas även musens datormarkör.
- Tracker PRO ansluts som en USB mus (därmed även Mac) och känner automatiskt av anslutningen enligt "plug & play" -inga extra drivrutiner.
- Pekarhastigheten är valbar i 2 lägen, relativt datorns grundinställning.
- Om tillämpningen saknar möjlighet till automatisk vänster-klick (dwell), finns alternativ, t ex: använda *Madentec Magic Cursor 2000*, ett program för PC för att automatiskt skapa olika klickfunktioner, mm.
- Tracker PRO kan med fördel användas för styrning av programmen "På-skärmen-tangentbordet" *WiViK3* & *AKK-programmet SoftVantage*. (Båda programmen finns att köpa hos Rehabmodul AB.)

Tracker PRO arbetar efter en enkel princip: Reflektion av ljusrörelser konverteras till datormusrörelser. Applicera reflexpunkten direkt på pannan, på tvärstaget på ett par glasögon eller annan lämplig plats på kroppen, som kan röras viljemässigt.



Bärbar dator: Använd standardclipset och montera på skärmens överkant och vrid detektorn 90° så att den pekar mot brukaren.

Bordsdator: Placera Tracker PRO på skärmen och rikta detektorn så att den pekar mot brukaren.



PRODUKTER

Tracker PRO

Magic Cursor 2000

Se prislstan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Artikelnummer

6471

6472

Några tekniska data

Mått: 51 x 51 x 83 mm. Vikt: Ca 120 g. Uttag: För manuellt klick/dubbel-klick med manöverkontakter, finns ett uttag 3,5 mm phono, stereo. Strömförsörjs av ansluten dator.

ISO 22 36 06

Rehabmodul AB är ansluten till



Rehabmodul AB



För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök Butiken på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm