

Bruksanvisning Unlimiter Access och Wobble Switch



Access Medium kan användas ihop med olika monteringsystem. Båda modellerna kan användas med kardborrefästen mm.



Unlimiter manöverkontaktserie **Access** omfattar två storlekar: *Mini* med diametern 26 mm resp. *Medium* med diametern 65 mm. Båda modellerna finns i färgerna röd, gul, grön och blå.

Anslutning till en apparat görs med 3,5 mm mono tele-plugg. Ledningslängden är 1,4 m.

Elektriska gränsvärden: Max 60 Volt likström alt. 25 Volt växelström. Max 500 mA.

Varje Access manöverkontakt (båda modellerna) har ett genomskinligt, avtagbart knapplock. Under knapplocket kan en bild placeras. Vrid MOT-urs för att öppna locket. Lägg i en bild och sätt på locket MED-urs.



OBS! Får endast användas i klenspänningsinstallationer. Anslut **ALDRIG** nätspänning!



Wobble Switch kan användas ihop med olika monterings-system, kardborrefästen mm.

Unlimiter Wobble Switch är en robust och lättmanövrerad spakkontakt med en slutande 1 polig kontaktfunktion. Den flexibla spaken kan röras i alla riktningar för att aktivera den inbyggda mikroswitchen. Spaken svarar på såväl stora som små rörelser och återtar sin utgångsposition efter det att den aktiverats.

Anslutning till en apparat görs med 3,5 mm mono tele-plugg. Ledningslängden är 1,5 m.

Totalhöjd: 135 mm. Styrspakens längd: 96 mm. Fothöjd: 39 mm. Vikt: 90g.

Elektriska gränsvärden: Max 60 Volt likström alt. 25 Volt växelström. Max 500 mA.

OBS! Får endast användas i klenspänningsinstallationer. Anslut **ALDRIG** nätspänning!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater