

Bruksanvisning

VoiSec Lite & VoiSec Lite Multi


Nytt leveransutförande fr.o.m juli 2010

Batterierna är inte aktiverade utan du måste själv ta bort plastfliken, (om den finns där) som sticker ut från batteriluckan. Vicka på fliken samtidigt som du drar den utåt!

1. Spela in nytt meddelande

MIKROFON

INSPEL.

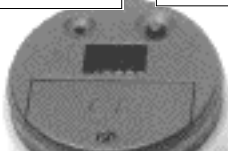

BATTERILUCKA med SKRUV (PH 0)

OBS! Ny inspelning raderar helt tidigare meddelande.

- Ta ut VoiSec Lite ur fästbrickan, vänd och håll INSPELNINGS (RECORD) knappen intryckt.
- Vänta på två pipsignaler, dra sedan andan och tala in ett meddelande på högst 1 minut. Tala rakt mot knappens undersida

på ett avstånd av 10 - 20 centimeter. Mikrofonen sitter till vänster om INSPELNINGS knappen (se bilden).

- När knappen släpps upp hörs det inspelade meddelandet. Sätt tillbaka fästbrickan.

OBS! Om VoiSec Lite Multi

VoiSec Multi lägger till inspelningar tills minnet är fullt. Därefter raderar nästa inspelning alla tidigare meddelanden och skapar ett nytt första meddelande.



2. Spela upp meddelandet

VoiSec Lite bör sitta i fästbrickan vid uppspelning. Tryck på locket för att spela upp ett inspelat meddelande. Tryck igen för att stoppa uppspelningen - om så önskas.

3. Felhantering

Avtalade garantier gäller. Kontakta Rehabmodul AB om du misstänker fabriksfel. Pga förpackningens utformning kan vi inte regelmässigt testa varje exemplar.

Du trycker på VoiSec Lite men inget hörs.

- Inget meddelande är inspelat.
- Knappen trycks inte ner ordentligt.
- Batterierna fel isatta *alt.* luckan inte ordentligt stängd.
- Batterierna är slut eller av fel typ. När batterierna börjar ta slut blir det svårt med täta uppspelningar. Den klarar ett antal uppspelningar till, med lite paus emellan.
- VoiSec Lite har kortslutits av fukt. Ta av fästbrickan, öppna batteriluckan och ta ur batterierna. Låt torka. Prova igen med nya batterier.

Ljudvolymen är för låg.

- Meddelandet talades in med för låg röst, knappen hålls felvänd, vid sidan om eller för långt ifrån munnen.
- Lyssningsavståndet är för stort. För mycket buller.

4. Fästa VoiSec Lite på föremål

- Kontrollera att fästbrickans yta är ren och torr.
- Tag bort eventuell skyddsfilm.
- Använd t ex medföljande självhäftande magnet eller andra fästmedel ur tillbehörssortimentet. Sätt den

centrerat på fästbrickans undersida. Om det inte fäster bra, rugga ytan lite och gör rent med t ex T-röd.

5. Tekniska fakta

Mått: Diameter 39 mm, höjd med bricka 18 mm.

Kapacitet: Högst 1 minuts talmeddelande.

Drifttid: Mer än 50 - 120 uppspelningar i rad av ett 20 sek. meddelande. Inspelad, mörk röst kortar drifttiden.

Strömförsörjning: 2 st 1,5 volts knappcells batterier av typ LR44. Även SR44 kan användas.

Rengöring: VoiSec Lite kan torkas av med trasa fuktad med vatten men får inte översköljas eller dränkas.

6. Byta batterier



OBS! Batteribyte raderar inte inspelat meddelande. **Se även punkt 7!**

- Öppna batteriluckan på knappens undersida genom att skruva bort skruven med en stjärnmejsel (PH 0). (Tappa inte bort skruven!) Lyft sedan av luckan.
- Lägg i - utan att trycka hårt - 2 st batterier av typ LR44 (eller SR44) med den släta sidan uppåt (plus) och upphöjningen (minus) nedåt.
- Sätt på luckan, skruva i skruven så att luckan sluter tätt. Sätt tillbaka VoiSec Lite i fästbrickan.

Till skillnad från tidigare modeller är batteriluckan hos VoiSec Lite försedd med en skruv. Detta är ett EU-krav, för att hindra barn att enkelt öppna batteriluckan. Lämplig skruvmejsel är stjärnmejsel PH 0, som bl a finns i en instrumentmejselsats, som säljs av Clas Ohlson, artnr 30-6427 till priset 19:-.

7. Mer om batterier

- Förbrukade batterier lämnas till batteriinsamlingen.
- Av miljöskäl används batterier av typ alkaline (LR44). Tidigare modeller var försedda med silveroxidbatterier som f.n. innehåller en mycket liten mängd kvicksilver. Kapacitetsskillnaden är dock rätt så betydande - silveroxidbatterier har 50% högre kapacitet jämfört med alkaline, vilket vi får leva med. Ur teknisk synpunkt kan vilken som av batterityperna användas.

OBS! Det finns inget befintligt eller planerat förbud mot att använda silveroxidbatterier. Det är också troligt att nya versioner silveroxidbatterier utan kvicksilver utvecklas.

- Följande 1,5 volt knappcells batterier (11,6 x 5,4 mm) kan användas i VoiSec Lite (samt äldre VoiSec):

ALKALINE - exempel

IEC/Duracell LR44 GP Batteries GPA76 Varta V13GA

SILVEROXID - exempel

IEC SR44 GP Batteries GP357 Duracell D357

Batterierna finns att köpa hos många livsmedelsbutiker, elektronik-/byggvaruhus, Clas Ohlson och Kjell & Company. Den sistnämnde har 10-pack LR44 med artikelnummer 32-357.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

VoiSec är ett registrerat varumärke av Libego AB. VoiSec är patenterad. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.
© Copyright 08/2010, Rehabmodul AB, Stockholm.