

Rehabmodul AB Snabbguide WiViK 3 Version 3.2

©: Rehabmodul AB, 12/2009

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

Vad är WiViK?

WiViK® (*Windows Visual Keyboard*) är ett "på-skärmen-tangentbord" för Microsoft Windows XP/Vista (32 bit)/ Win7 (32 bit). Ett WiViK tangentbord visas i ett fönster, som bl a kan flyttas och ändras i storlek. Ordprediktion ingår.

Tangenter väljs genom att peka, klicka, dra och släppa eller autoaktivering eller scanning. När en tangent väljs med WiViK matas motsvarande tangentslag hos ett riktigt tangentbord in i den för tillfället aktiva programmet. Det ordinarie tangentbordet fungerar hela tiden parallellt. Programmen behöver inte modifieras för att kunna användas. *WiViK är ett MYCKET stabilt program!*

Nytt i WiViK 3.2

Största förändringarna jämfört med tidigare versioner har skett med ordprediktionen. WiViK 3.2 inkluderar WordQ 2 ordprediktion i stället för WordQ 1.x. Nya ordprediktionsfunktioner inkluderar, bl a:

- Insättningspunktkänslig prediktion (In-context prediction) som underlättar korrigeringar

genom att anpassa prediktionen beroende på var i texten insättningspunkten sätts. Funktionen fungerar bäst i program som stöder MS Active Accessibility (t ex Word, WordPad, Anteckningar, Outlook m.m).

- Kreativ stavning gör att rätt ordförslag visas trots stavfel i den inmatade texten.


Systemkrav

Rekommenderade systemkrav är:


- PC med processor motsvarande Pentium III på minst 800 MHz
 - Följande Windows® versioner stöds: Windows® XP, Vista (32 bit) och 7 (32 bit)
 - 1 GB RAM eller mer
 - Minst 300 MB+ ledigt utrymme på hårddisken om även en talsyntes ska installeras
 - Ljudkort och högtalare eller hörtelefonset (för talsyntes)
 - För anslutning av manöverkontakter behövs antingen: USB-port (1-6 mk via USB manöverkontaktlåda) GAME-port (1-6 manöverkontakter via adapter). Seriellport (1-2 manöverkontakter via adapter)
- Tillbehör för manöverkontakter kan köpas från Rehabmodul AB!*

Installera från CD

1. Sätt i WiViK i CD-spelaren.
2. Om inte installationen startar automatiskt, dubbel-klicka på **Den här datorn** och sedan på WiViK CD ikonen. Dubbelklicka sedan på **Setup.exe** filen.
3. Följ instruktionerna som visas på skärmen.
4. När installationen är färdig, ska du registrera dig i "WiViK Registration" boxen.

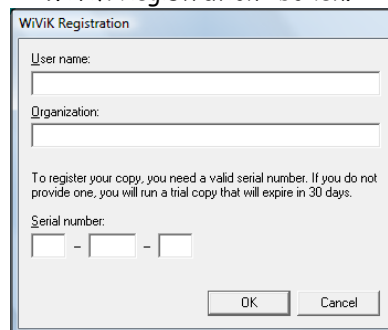

Fyll i namn och serienummer. När du registrerar WiViK ska du bara göra det i "WiViK Registration".

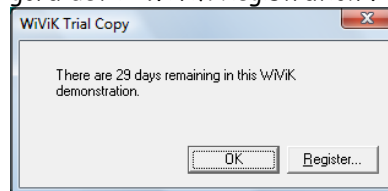

Om du saknar serienummer kan du köra WiViK (eller WordQ) som demo under högst 30 dagar.


Svenska tillägg

En svensk ordlista med ca 15 000 ord, extra tangentbord och bruksanvisningar (PDF) kan installeras med installationsprogrammet på CDn **WiViK 3-Svenska tillägg**.

1. Sätt in CDn **WiViK 3 - Svenska tillägg** i datorn.
2. Starta installationsprogrammet "wivik3_sv_tillag.exe" som ligger i mappen "WiViK3 - Svenska tillägg" på CDn.
3. Följ instruktionerna som visas på skärmen

Använda WiViK för första gången

1. Välj WiViK Start meny (**Start > Program > WiViK > WiViK**) eller dubbel-klicka på WiViK ikonen, som skapades vid installationen. Ett amerikanskt standard tangentbord med ordprediktion visas: (USENGLISH_TOP.kbp).

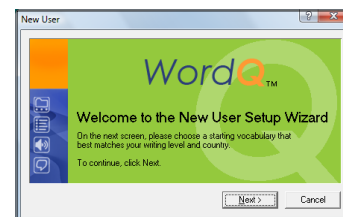

Första gången du startar WiViK blir du ombedd att skapa en WordQ användarordlista. En "Wizard" hjälper dig genom procedurerna.

Om **Svenska tillägg** har installerats (se föregående spalt) välj **Swedish** i listan som visas. Om inte, välj **US Blank** (som också kan användas som utgångspunkt om du tänker bygga upp en egen ordlista). Klicka på Next.

Från nu måste du gå vidare med bruksanvisningen, som medföljer. Se sidan 4!

Egna anteckningar:

Serienummer: _____

Datum: _____

Övriga noteringar: _____

Om du har frågor - kontakta oss!