

Programmet WRITE´n SPEAK



WRITE´n SPEAK är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

WRITE´n SPEAK för dig som har en talsyntes och vill använda den på ett enklare och funktionellare sätt-till låg merkostnad.
- Mer än 1 700 - över hela världen - har laddat ner en demo!

WRITE´n SPEAK medföljer **GRATIS** när du köper Infovox talsyntes från oss!

- WRITE´n SPEAK är ett universellt verktygsprogram, som kopplar ihop ditt tangentbord, urklippet och en talsyntes.
- Du kan få text skriven på tangentbordet talad som bokstäver, ord eller meningar. Detta samtidigt som du skriver i t ex Microsoft Word med flera. Du kan även markera valfri text och få den talad.
- Med WRITE´n SPEAK kan du styra och kontrollera talsyntesens alla funktioner, t ex talsätt, talhastighet, röstval etc.
- WRITE´n SPEAK är funktionstestad med Acapela Infovox- och Microsofts-talsynteser. För att WRITE´n SPEAK ska fungera måste minst Microsoft Speech API 4.0 och Voice Manager systemtillägg vara installerade. Om dessa inte redan finns i din dator, sker detta automatiskt av installationsprogrammet för talsyntesen.
- När du köper WRITE´n SPEAK får du ett serienummer, som du skall fylla i första gången du startar programmet.
- Saknar du serienummer, kan du genom att klicka på knappen på "Demo" köra WRITE´n SPEAK i DEMO-läge, med följande begränsningar:



- Programmet stänger automatiskt av sig självt efter 20 minuter, men du kan starta WRITE´n SPEAK hur många gånger som helst.

- Programmet sparar inget i "Talinställningar"/"Start vid systemstart".



Prova själv genom att ladda ner en gratis Demo av WRITE´n SPEAK från:
www.rehabmodul.se

• **Svensk version - med bruksanvisning på svenska!**

Aktivera/deaktivera WRITE´n SPEAK

- Med tangenten "NumLock", som finns bland siffertangenterna längst till höger på tangentbordet, kan du aktivera och deaktivera av WRITE´n SPEAK.
- Tangenten "NumLock" tänds och släcker lysdioden "NumLock".
- När lysdioden "NumLock" är **tänd** är WRITE´n SPEAK **inaktiv**, dvs tyst. Nu fungerar NumPad-tangenterna som vanliga siffertangenter.
- När lysdioden "NumLock" är **släckt** är WRITE´n SPEAK **aktiv**, dvs talar. Nu fungerar NumPad som kommandotangenter som styr WRITE´n SPEAK.
- WRITE´n SPEAK aktiveras av när "Talinställningar" eller "Start vid systemstart" dialogerna visas.
- Symbolen i Aktivitetsfältet visar om WRITE´n SPEAK är aktiv eller inte. "Röda läppar" visar att WRITE´n SPEAK är aktivt.

Använda WiViK 3 med WRITE´n SPEAK och Infovox Desktop!


- WiViK 3 fungerar som vanligt. WRITE´n SPEAK är ett hjälpprogram, med inställningar för stavning/ord/meningar.
- Klicka på en bokstav på WiViK 3 tangentbord. Tecknet visas i det aktiva, valfria textdokumentet samtidigt som bokstaven läses upp automatiskt.
- Fortsätt välja bokstäver, vilka läses upp och skrivs i dokumentet. När ordet är färdigt - gör mellanslag och hela ordet läses upp automatiskt.
- Gör punkt (eller ! ?) efter sista ordet i meningen. Detta ord samt hela meningen läses upp.

PRODUKTER Artikelnummer

WRITE´n SPEAK, CD, 1 installation 7701

Se prislistan (www.rehabmodul.se)
för aktuellt pris! Flerlicenser på förfrågan.

ISO 22 36 18

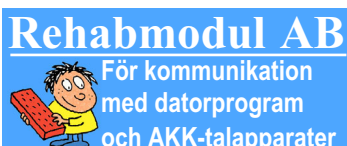

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm