

# Rehabmodul AB Snabbguide

©: Rehabmodul AB, 03/2015

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se



# Big Button

Standard

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

## Big Button Standard (BIG-01).

Artnr: 3813

En talapparat som har inbyggd, lätttryckt Play-knapp (75 x 75 mm) med genomskinligt fack där en bild kan stoppas in.

- Format: Diam. 145 x 40 mm. Vikt: 220 g. 2xLR03 (AAA) alkaline batterier. En separat manöverkontakt kan också användas som Play-knapp. Uttaget är på högersidan, strax ovanför Volym upp-knappen. (Phono 3,5 mm, singel.)
- 1 meddelande (Singel) på högst 30 sekunder.
- 3 meddelanden (Multi) på högst 30 sekunder, som kan läsas ut var gång Play-knappen trycks ned.
- Se även bifogade amerikanska User's Guide för fler bilder!

En mer avancerad variant med nivåer och stegning finns även: Big Button (BIG-05), som har 10 nivåer - var och en med 8 sek inspelningsstid samt 3 aktiviteter - var och en med tio 8 sek steg.  
Artnr: 3814

Tryck på ovansidan eller nedtill för att läsa ut meddelanden



## Snabbt komma igång



### 1. Grundfakta

- PÅ/AV switch på undersidan
- Drivs med 2 st LR03 (AAA) batterier (ingår vid leverans)
- Inspelningsknapp (REC) på undersidan
- Volymkontroll med upp/nerknappar på ovansidan
- Ingjutet fästhål för monterings-tillbehör samt nyckelhålsfäste för väggmontering finns på undersidan
- Fack för förvaring av överlägg på undersidan

### 2. Funktioner

- Välj mellan Single eller Multi meddelanden med en switch på undersidan
- Singel har ett meddelande med en inspelningsstid av 30 sekunder.
- Multi har upp till tre meddelanden med en inspelningsstid av 30 sekunder.
- Vid Multi: Spela in och läs ut med att trycka på Play-knappen en, två eller tre gånger.

## Volym

Volymen - högtalarljudet - styrs med  och  knapparna på apparatens ovansida, till höger om Play-knappen. Ett pip-ljud hörs var gång justering görs.

## Singel- och Multi-funktionerna

Välj mellan två funktionssätt med omkopplaren Multi/Single på undersidan.

- Vid Singel (Single), läses samma meddelande ut varje gång Play-knappen trycks ned.



- Vid Multi (Multi) kan du välja att spela upp ett av de tre meddelandena. Vilket meddelande det blir beror på hur många gånger du trycker på Play-knappen. Ett tryck läser ut meddelande 1. Två (snabba) tryck läser ut meddelande 2, osv.

## Inspelnings vid Singel

1. På undersidan, sätt Multi/Single switchen i läge **Single**.
2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan - dvs apparaten är nu klar för inspelning.
3. Tryck på och släpp Play-knappen och då ska den röda LED börja blinka. (Naturligtvis har du i förväg förberett vad du ska tala in!) Mikrofonen sitter strax under Volym-ned knappen - tala mot mikrofonen på ett avstånd av c:a 20 cm.

OBS: Klicket du hör när du trycker på Play-knappen kommer inte med på inspelningen.

Fortsättning nästa sida!

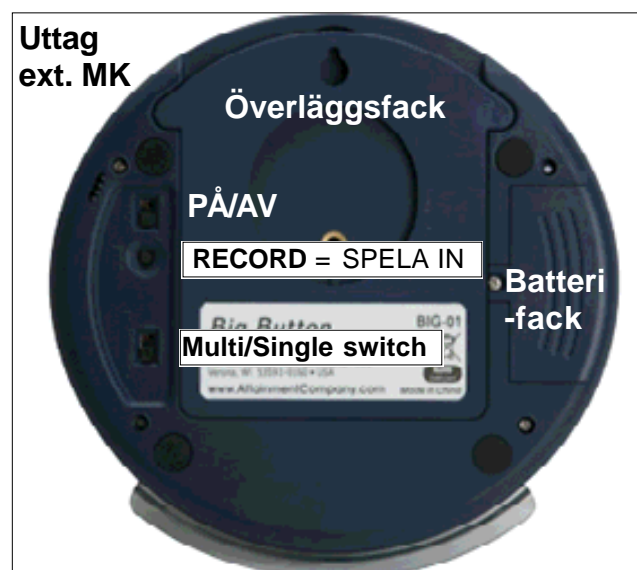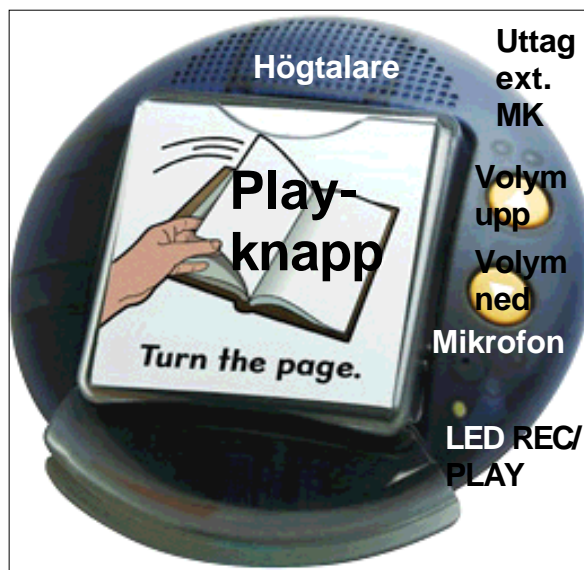

4. Tryck på och släpp Play-knappen *igen*, när du talat färdigt. Högsta inspelningstid är 30 sekunder och då avslutas inspelningen automatiskt. Röda LED lyser åter med fast sken.

5. Tryck på och släpp Volym ned-knappen för att lyssna på inspelningen. För att göra om - upprepa punkterna 3 - 4!

6. Avsluta inspelning med att trycka på och släppa REC-knappen. Röda LED slocknar.

## Läsa ut meddelande vid Singel

- Tryck på och släpp Play-knappen.
- Record/Play LED börjar blinka grönt under uppläsning. Om du vill avbryta, tryck kort på Play-knappen igen.

## Radera ett Singel-meddelande

1. På undersidan, sätt Multi/Single switchen i läge **Single**.
2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan och visar att radering kan göras.

3. Tryck på och släpp Play-knappen och röda LED blinkar. I nom 1 sekund - tryck igen på Play-knappen och meddelandet är raderat.

4. Tryck på och släpp REC-knappen för att lämna inspelningsläget.

## Inspelning vid Multi

1. På undersidan, sätt Multi/Single switchen i läge **Multi**.

2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken (efter 1 sek fördröjning) på framsidan - dvs apparaten är klar för inspelning.

3. Tryck på och släpp Play-knappen en gång (meddelande 1) och nu ska den röda LED börja blinka. (Naturligtvis har du i förväg förberett vad du ska tala in!) Mikrofonen sitter strax under Volym-ned knappen - tala mot mikrofonen på ett avstånd av c:a 20 cm.

*OBS: Klicket du hör när du trycker på Play-knappen kommer inte med på inspelningen.*

4. Tryck på och släpp Play-knappen *igen*, när du talat färdigt. Högsta inspelningstid är 30 sekunder och då avslutas inspelningen automatiskt. Röda LED lyser åter med fast sken.

5. Tryck på och släpp Volym ned-knappen för att lyssna på inspelningen. För att göra om meddelande 1 - upprepa punkterna 3 - 4!

6. För att fortsätta inspelningarna med meddelande 2, tryck snabbt på och släpp Play-knappen 2 gånger. Röda LED blinkar och du kan tala in meddelandet. Tryck på och släpp Play-knappen *igen*, när du talat färdigt.

7. För att fortsätta inspelningarna med meddelande 3, tryck snabbt på och släpp Play-knappen 3 gånger. Röda LED blinkar och du kan tala in meddelandet. Tryck på och släpp Play-knappen *igen*, när du talat färdigt.

8. Avsluta inspelning med att trycka på och släppa REC-knappen. Röda LED slocknar.

## Läsa ut meddelanden vid Multi

- Tryck på och släpp Play-knappen en gång för att läsa ut meddelande 1.
- Tryck snabbt 2 gånger för att läsa ut meddelande 3, osv. Record/Play LED börjar blinka grönt under uppläsning. Om du vill avbryta, tryck kort på Play-knappen igen.

## Radera ett Multi-meddelande

1. På undersidan, sätt Multi/Single switchen i läge **Multi**.

2. Tryck på och släpp REC-knappen (inspelning). En röd LED lyser med fast sken på framsidan och visar att radering kan göras.

3. För att radera meddelande 1, tryck på och släpp Play-knappen en gång och röda LED blinkar efter en sekund. I nom 1 sekund - tryck igen på Play-knappen och meddelandet är raderat. För att radera meddelande 2 resp 3, tryck 2 resp. 3 gånger för att välja meddelande.

4. Tryck på och släpp REC-knappen för att lämna inspelningsläget.

## Förhindra inspelningar

- Lås apparaten genom att först stänga av med PÅ/AV-knappen.
- Håll Volym upp-knappen intryckt och sätt på igen med PÅ/AV-knappen.
- När två stigande pip hörs, som indikerar att låset är aktivt, släpper du Volym upp-knappen.
- För att avaktivera låset, gör om ovanstående och när två fallande toner hörs är låset borttaget.

**Avfallshantering**  
Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.