

Rehabmodul AB Snabbguide



GoTalk9+ Lite Touch

©: Rehabmodul AB, 02/2024 Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 070-835 8891 • www.rehabmodul.se

Attainment Company's

GoTalk9+ Lite Touch
- med lätttryckta tangenter
Artikelnummer: 3102B



På baksidan av GoTalk finns en etikett på engelska som kortfattat visar de viktigaste funktionerna och hur de används.

Nivåindikering
gröna lysdioder

Mikrofon

Högtalare

Direktvalstangenter
15 sekunder på varje

Meddelandetangenter
10 sekunder på varje
och med 5 nivåer

RECORD =
Spela in



Batterifack



Inspelning
röd lysdiod

Volymkontroller

Byt nivå
tangenter

Inbyggt hålraster

Skyddsficka i plast

Överläggsflik

Total
inspelningstid
är 8,5 minuter

Spela in meddelanden

- Sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren på baksidan. Läge PÅ (ON) - om den inte redan är på. Ett pip hörs.
- Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). En grön nivåled (LED) och den röda RECORD-LED ska nu vara tända.
- Medan båda LED lyser - **tryck på och släpp** önskad meddelandetangent. Den röda lysdioden börjar blinka, för att indikera att inspelning nu sker.
- Tala in i mikrofonen, som är placerad under handtaget. När du talat färdigt, tryck på valfri meddelandetangent.
- Fortsätt att spela in varje meddelande på denna eller flera nivåer. När du är klar: Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan).



Läsa ut meddelanden

- Tryck (och släpp) eller glid över (med tryck) på önskad meddelandetangent och inspelat meddelande läses upp. En grön nivåled blinkar samtidigt. **V.G. VÄND!**

Rehabmodul AB Snabbguide



GoTalk9+ Lite Touch

©: Rehabmodul AB, 02/2024

Astrakängatan 151 · 165 52 Hässelby · Tel: 070-835 8891 · www.rehabmodul.se

Nivåer

Ändra nivå


Tryck på nivåknappen en gång. Grön LED blinkar vald nivå. Tryck upprepat på samma knapp för att ändra till annan nivå. Byt överlägg för att passa till nu vald nivå.

Radera en hel nivå

Tryck och släpp **RECORD** tangenten (på baksidan). Tryck upprepat på nivåknappen fram till den nivå som ska raderas.

Med spetsen på t ex en kulspetspenna, trycks knappen in vid "Erase Level" (på baksidan). Den valda nivån raderas helt. Repetera ovanstående för att radera andra nivåer.

OBS! Denna procedur raderar inga meddelanden, som lagrats under direktvalstangenterna.

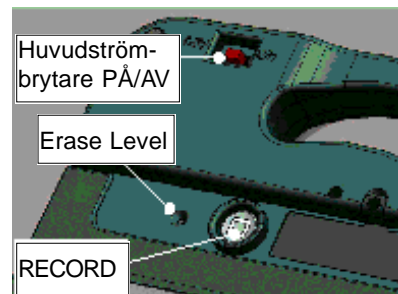

Strömförsörjning


- I läge AV drar GoTalk ingen ström. Vid PÅ - en mycket låg ström i viloläge.
- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkalinebatterier av typ LR6 (AA).
- Tillverkaren uppger en batterilivslängd på 3 - 6 månader vid normal användning.
- Batterierna finns i batterifacket på baksidan. Luckan är försedd med en skruv.

Funktionslås


Funktionslås används för att förhindra oönskad påverkan av nivåer eller inspelningar.



Förhindra nivåbyte

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM NED** . Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Förhindra inspelningar

Aktivera låset genom att hålla **RECORD** (på baksidan) intryckt. Röd RECORD och grön nivå LED tänds. Fortfarande med intryckt **RECORD** tangent, tryck på och släpp knappen **VOLYM UPP** . Röd och grön LED släcks, vilket indikerar att låset är PÅ.

Ta bort låsen:

Stäng av GoTalk med huvudströmbrytaren (på baksidan - läge AV). Håll **RECORD** (på baksidan) intryckt och sätt på GoTalk med huvudströmbrytaren till läge PÅ. De gröna lysdioderna tänds en i taget och den röda tänds helt kort. Även ett pip hörs. *Båda låsen är nu borta.*

Fack för förvaring av överlägg



Minst ett överlägg för varje nivå, kan förvaras i facket. Överläggen är nu lätt tillgängliga vid byte av nivå.

Användningsområden

GoTalk kan användas i olika aktiviteter. Här är några få exempel:

- Allmän, talad kommunikation.
- Talad kommunikation i vissa sammanhang och miljöer.
- Läsa upp instruktioner och anvisningar i givna sammanhang.
- Träning i användning av ett talande AKK-hjälpmedel.
- Träning av bild- och språkförståelse.

3 direktvalstangenter

Inspelning: Följ samma procedur som för meddelandetangenter. Ett meddelande inspelat på en direktvalstangent kan alltid användas oavsett vald nivå. En ny inspelning läser över den gamla.



De 3 direktvalstangenterna kan anpassas för valfria aktiviteter!



eller?



Direktvalstangenterna bör användas för ord och fraser som används ofta. Sociala fraser, t ex hälsningar, kommentarer, frågor etc.

- 9 meddelandetangenter med 5 nivåer vardera - ger totalt 45 meddelanden.
- 3 direktvalstangenter, som kan användas oberoende av vald nivå.
- Totala inspelningstiden är c:a 8,5 minuter. • Rutstorleken är 45 x 57 mm.
- Inbyggt handtag. • Låg vikt, c:a 640 g. • Formatet är 230 x 300 x 28 mm.
- Inspelade meddelanden är kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!

AVFALLSHANTERING

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall!