


Bruksanvisning

Pratnypor (Recordable Pegs)



Artnr: 3633 (6 pack, färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila)

Gedigna, robusta och lättaktiverade talapparater, med beröringskontakter och högt, klart ljud. Försedda med klämma samt magneter. Gör egna inspelningar - 10 sek. på varje! Vikt: 77g. Format: 112 x 50 x 38 mm.

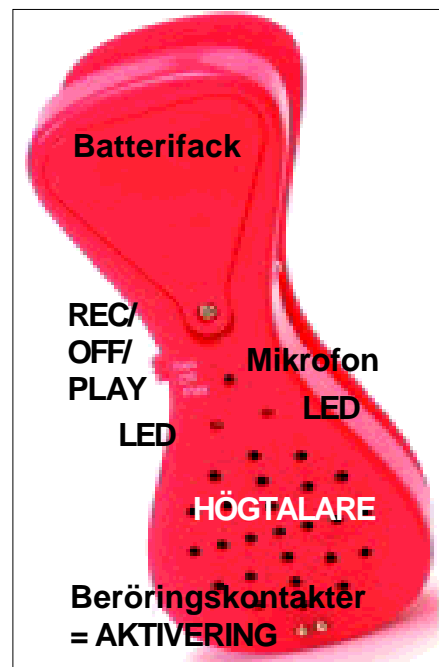

OFF = apparaten avstängd

Spela in ett meddelande

- Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
- Berör metallknapparna med en fingertopp (fukta fingertoppen lätt om inget händer och försök igen) Röd LED tänds.
- Tala in i mikrofonen. Du kan spela in ett meddelande på högst 10 sek.. Inspelningsnivån är automatisk
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att beröra metallknapparna igen. När du är klar - sätt REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

Läsa upp ett meddelande

Berör metallknapparna och inspelat meddelande läses upp. Grön LED lyser. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!

Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

Installera/byta batterier

Batterier är isatta. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alla batterierna vid samma tillfälle! Batterifacket sitter på talapparatens framsida (se bilden).

- För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nyknappceller. Glöm inte bort hur de ska sitta, dvs med släta sidan uppåt. Batteritypen är silveroxid och beroende på fabrikat: SR44, AG13, D357, V357, 357, m fl. (Även alkalinebatterier kan användas, LR44, m fl.) Mått: diam. 11,6 x 5,4 mm samt 1,5 volt. Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater