

Bruksanvisning Pratpuck/Pratpuck PRO



Artnr:

3080-osorterade färger (någon/några av röd, orange, grön, blå, lila, gul)

3087-6 pack samt

3086-svart/PRO

Spela in ett meddelande

- Sätt REC/OFF/PLAY knappen i läge REC.
- Tryck på knappen under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst 10 sek. (PRO 30 sek.). Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt REC/OFF/PLAY i läge PLAY.

Läsa upp ett meddelande

Tryck på knappen och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.


Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!

Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

Gedigen, robust och lättryckt talapparat med högt, klart ljud. Gör en egen inspelning - 10 sek.! 6 färger. *Pratpuck PRO kan lagra 30 sek. och har svart lock.* Vikt: 27g. Format: diam. 47 x 27 mm.

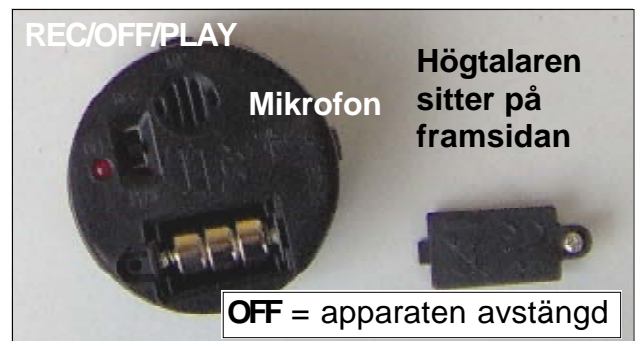

Installera/byta batterier

Batterier är isatta. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle! Batterifacket sitter på talapparatens undersida.

- För att sätta i/byta batterierna, skruvar du ur skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i tre nya knappceller. *Glöm inte bort hur de ska sitta, dvs med släta sidan mot skruvhålet (Se bilden).* Batteritypen är alkaliebatterier, LR44, m fl. (Även silveroxidbatterier kan användas och beroende på fabrikat: SR44, AG13, D357, V357, 357, m fl.) Mått: diam. 11,6 x 5,4 mm samt 1,5 volt.

Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

