



Analog klocka DIANA

Modell: TalkTech 51142

O Artnr 3833

Boettstorlek: 37 mm

Vikt:

Batteri: 1 st CR2032

Modell: TalkTech 51143

O Artnr 3834

Boettstorlek: 33 mm

Vikt:

Batteri: 1 st CR2032

OBS!

• Du måste själv ändra mellan sommar- och vintertid!

• Byte av språk görs med K4 (håll intryckt c:a 5 sek och stega till önskat språk!

1) Starta uret

Uret levereras avstängt. Håll uret emot dig. På klockhusets högra sida finns en knapp (se bilden), "TALKNAPP". Håll den intryckt i 3 sek. så startar uret med två pip.

2) Stänga av uret

Tryck in knappen "TALKNAPP" i 5 sek. och uret tystnar. Analog verkets stängs inte av.

Läs rutan här nedan!

OBS!

Om du trycker "för länge" på Talkknappen stängs ljudet av. Tryck igen på Talkknappen, tills det piper till och ljudet är på igen!

3) Ställa in tid

Håll uret emot dig. ANALOGA VERKET
Dra försiktigt ut kronskruven och "pilla bort" den lilla röda plastbiten under kronskruven och ställ in tiden. Tryck sedan åter in kronskruven.

DIGITALA VERKET MED TAL

På verkets vänstra sida finns ställknappen K2 för inställning av timmar, resp. högra sidan ställknappen K3 för minuter.

Knapparna är infällda, så du måste använda ett spetsigt föremål för att trycka in.

Högtalaren sitter på undersidan

K4 Ställ:

Dag/språk

K2 Ställ:

Timmar

Ställknapparna är infällda.

Tryck på Talkknappen för att läsa ut!



K1 Tal-knapp

Inställning -analogt ur

K3 Ställ: Minuter

4) Välj analog eller digital tidsangivelse

Exempel:

Måndag, tid kl. 14.15
- Talet kan ange inställd tid *analogt*: "måndag, kvart över två på eftermiddagen" - eller *digitalt*: "måndag, fjorton och femton".
Ändra inställningen genom att stega runt i 24 timmars intervaller med K2.

Dvs, för att ändra inställning på talet ställer du fram klockan 24 timmar.

5) Intervaller för dygnsangivelse

• Natt till morgon: 05.25
• Morgon till förmiddag: 07.25
• Förmiddag till eftermiddag: 11.25
• Eftermiddag till kväll: 16.25
• Kväll till natt: 22.25

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

OBS! - VIKTIG INFORMATION OM ARMBANDSURET!

Boetten är skyddad mot nickelallergi. Medföljande läderarmband är fritt från latex. Klockorna är inte vattentäta eftersom de har en öppning för högtalaren. Undvik därför att ha den på dig när du duschar, badar, diskar eller kommer i kontakt med andra vätskor. Garantin täcker inte sådana fel vid användning.

Klockorna är CE-märkta. Batteriets livslängd beror på hur ofta du aktiverar talfunktionen. Ett nytt batteri klarar ca 1 års drift vid "normal" användning. Batteribyte kan göras hos urmakare eller hos oss. Garantin för tillverkningsfel är 1 år. Om klockan öppnats och inte hanterats på ett fackmannamässigt sätt gäller inte garantin.