

Bruksanvisning ”nya” Klockan Klara

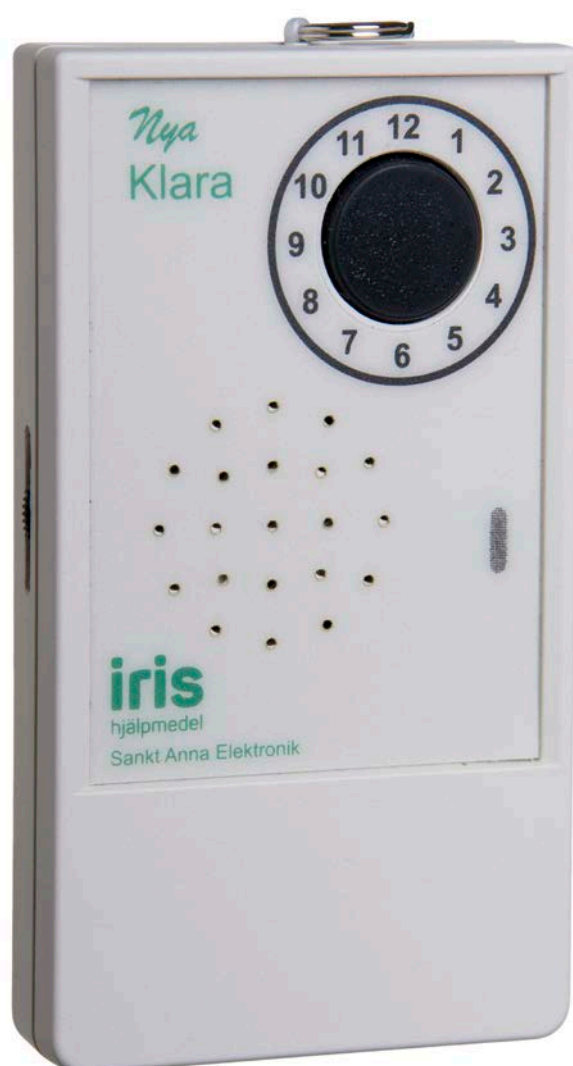

Art nr 51087

Bruksanvisning Klockan Klara


Allmänt:

"Nya" Klockan Klara är en svensktalande klocka som efter ett tryck på den stora lätttryckta avläsningsknappen talar ut aktuell tid på samma sätt såsom vi människor talar, dvs. klockan säger kvart i.., halv.. , fem över halv.. osv. Klockan säger även dygnsangivelse t ex morgon, förmiddag, eftermiddag osv. Håller man knappen nedtryckt ytterligare får man inställt datum och månad uppläst.


Tillkommande funktioner i "Nya" Klara. Sommar och vintertid kan ställas in. Utöver tid kan datum och månad läsas upp. Möjlighet till timrapportering mellan 09.00 och 21.00. Bättre batterihushållning. Batterivarnare inbyggd, säger "batteri" när det börjar bli dags att byta. Bättre gummerad och stabil avläsningsknapp. Förstärkt högtalargaller.

Klockan är enkel att hantera och att sköta. Det finns en ögla och en medföljande halsrem som gör den enkel att bära.

Beskrivning av Klockan Klara:

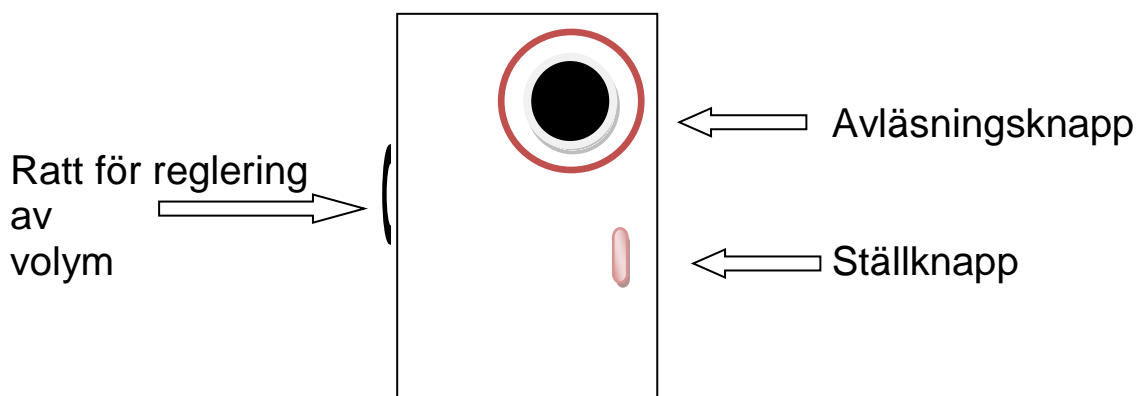

Avläsningsknapp Tryck på avläsningsknappen och Klara läser upp tiden i klartext. Håll kvar och Klara anger datum och månad. Klockan säger kvart i.., halv.. , fem över halv.. osv.

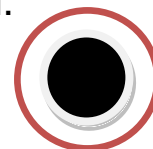

Klockan Klara säger även dygnsangivelse enligt nedan samt veckodag.

- Kl 23 .00 – 5.59 natt
- Kl 6.00 – 8.59 morgon
- Kl 9.00 – 11.59 förmiddag
- Kl 12.00 – 17.59 eftermiddag
- Kl 18.00 – 22.59 kväll

Volymreglage: Volym justeras genom att vrida på reglaget på Klockan Klaras vänstra sida.

Ställknapp: Placerad på klockans framsida, svagt markerad med en oval röd yta.

Här ställer du tiden samt veckodag.

OBS! Klockan Klara ändrar automatiskt mellan sommar- respektive sommartid.


Ställa tid, dag och månad i "nya" Klockan Klara:

1. Håll **Ställknappen** nedtryckt och håll kvar. Klara kvitterar med ett kort pip och säger "*Ställ timmar*" och aktuell timme
2. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuell timme.
3. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen och håll kvar. Klara säger "*Minuter*" och aktuella minuter.
4. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuella minuter
5. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen och håll kvar. Klara säger "*Dag*" och aktuell veckodag.
6. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuell dag.
7. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen och håll kvar. Klara säger "*Månad*" och aktuell månad.
8. Stega med **Avläsningsknappen** till aktuell månad.
9. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen och håll kvar. Klara säger aktuellt "*år*". 0 är skottår och 1 – 3 mellanliggande år. Skottår är 2020, 2024 och 2028. Detta för att hålla reda på den 29 februari varje skottår.
10. Släpp tillfälligt **Ställknappen**. Tryck ner **Ställknappen** igen och håll kvar. Klara säger "*Tal*" och aktuell inställning "*Till*" eller "*Från*". Denna valbara funktion är en automatisk timrapportering mellan 09.00 och 21.00. Inställt läge vid leverans är "*från*"
11. Nu är inställningarna klara. Släpp **Ställknappen** och Klara kvitterar med 2 korta pip.
12. Du kan avsluta inställningarna genom att när som helst under processen släppa **Ställknappen**. Klara kvitterar med 2 korta pip.

Batteriindikator och batteribyte:

"Nya" Klockan Klara indikerar själv när batterierna börjar bli svaga genom att säga "batteri".

Klockan Klara drivs av 2 st R03 batterier som är bipackade vid leverans. Dessa monteras eller byts genom att lossa krysskruven till batterifacket på baksidan av klockan med skruvmejsel. Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier läggs i batterifacket. Observera polariteten, det översta batteriet pluspol åt höger, det undre batteriet pluspol åt vänster, rätt polaritet står även märkt i lådans botten. Vid felaktig batteriisättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund.

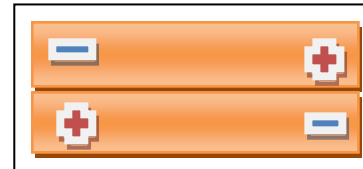

Klara behåller inställningarna utan batterier under drygt 4 minuter.

Storleken är 105x57x18 mm.

Batterier ingår och är monterade vid leverans.

Underhåll och service:

Klara behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteri-insamling. Klara återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn. Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB (gäller särskilt under garantitiden). Använd serviceblankett på under Service & Support på www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede
info@hjalpmedel.se, Tel. 08-39 94 00