

## Bruksanvisning Pratbrickor - 6 färger



Artnr:

3517- osorterade färger (någon/några av röd, svart, grön, blå, vit, gul)

3518- 6 pack paket

Mycket gedigen, robust och lätttryckt talapparat. En bild kan läggas under locket. Gör en egen inspelning - 80 sekunder! Bildformatet är c:a 65 x 60 mm. Nyckelhålsfästen för eventuellt väggmontage. Vikt: 80 g. Format: 95 x 95 x 25 mm.

### Spela in ett meddelande

- Sätt OFF/ON knappen i läge ON.
- Sätt REC/PLAY knappen i läge REC.
- Tryck på knappen under hela inspelningen. Lysdioden tänds.
- Tala in i mikrofonen (MIC). Du kan spela in ett meddelande på högst **80 sekunder**. Inspelningsnivån är automatiskt reglerad.
- Låt tiden gå ut (lysdioden släcks) eller avsluta inspelningen genom att släppa knappen. När du är klar - sätt REC/PLAY i läge PLAY.
- Du kan spela in från en annan ljudkälla genom att ansluta en kabel mellan **Ljudingång** och den andra enheten, t ex cd-spelare, dator m fl.

### Läsa upp ett meddelande

Tryck på knappen och inspelat meddelande läses upp. Ingen volymkontroll - anpassa därför inspelningarna till de förhållanden som de ska användas under.

### Spela över ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan!


### Ta bort ett meddelande

Följ proceduren enligt ovan, men tala inte in något meddelande!

#### *Avfallshantering*

*Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.*

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på grund av tryckfel.

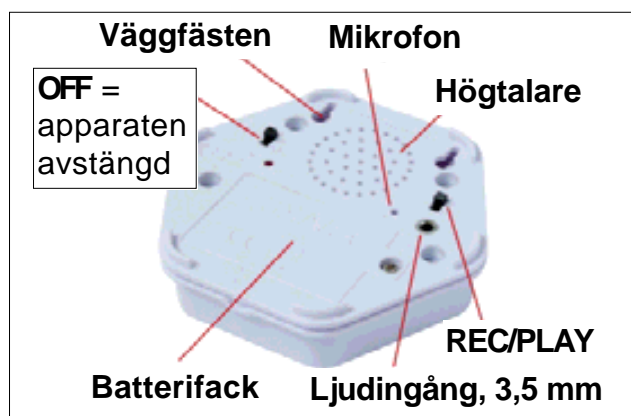

### Installera/byta batterier

*Du måste sätta i batterier LR03 / AAA, för att använda Pratbrickan. Batterifacket sitter på talapparatens undersida. När ljudet inte låter bra är det tecken på att batterierna behöver bytas. Byt alltid alla batterierna vid samma tillfälle!*

- För att sätta i/byta batterierna, lossar du skruven och tar bort luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i 3 nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 / AAA (se markeringarna). Sätt tillbaka luckan och skruva åt skruven.

